



СДЕЛАНО В РОССИИ. 50 ШТУК

№ ТУ 32.50.50 - 001 - 26734662 - 2020. Регистрационное удостоверение 2020/10246

Из нетканых материалов, трехслойные, с носовым фиксатором «Медфармсити»

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ

МЕДФАРМСИТИ 



Условия хранения:
Хранение медицинских масок допускается в неповрежденной упаковке в отапливаемых, вентилируемых помещениях при температуре воздуха окружающей среды от +5 оС до +40 оС и относительной влажности воздуха не более 80%. Следует избегать попадания на упаковку прямых солнечных лучей, воды, иных жидкостей.

Инструкция к применению:

1. Достать маску из упаковки и расположить ее горизонтально перед лицом, держа за заушные петли (резинки). В верхней части маска имеет встроенный гибкий фиксатор для носа с целью фиксации маски на носу, улучшения прилегания маски в области переносицы за счет повторения формы носа.
2. Надеть маску на лицо, обеспечив ее плотное прилегание к лицу путем заведения резинок за ушные раковины.
3. Расправить складки, расположенные в середине изделия для распределения маски на лице с учетом анатомических особенностей носоротовой области лица. Для более плотного прилегания сторон медицинской маски к верхней части лица используйте фиксатор для носа.
4. Использованные по назначению маски утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 для медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

Порядок утилизации маски в домашних условиях: снять маску, положить в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокаляемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета, герметично закрыть упаковку (контейнер), сделать надпись: «Отходы класса Б», утилизировать.




4 6 0 3 3 7 8 0 1 2 3 5 2

МЕДФАРМСИТИ 

МЕДФАРМСИТИ 

 **Время использования:**
Подлежит замене не позднее 2 часов после начала использования.

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ
Из нетканых материалов, трехслойные, с носовым фиксатором «Медфармсити»
по ТУ 32.50.50 - 001 - 26734662 - 2020. Регистрационное удостоверение 2020/10246

 Маски медицинские трехслойные из нетканых материалов с носовым фиксатором. Представляет собой изделие медицинского назначения однократного применения.

 Предназначена в качестве барьерного средства при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, эффективно препятствует выходу инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.

 Изделие зарекомендовало себя в профилактических мероприятиях, направленных на снижение риска инфицирования населения вне медицинских учреждений.

Размер 17,5 см * 9,5 см

МЕДФАРМСИТИ 

Используется в качестве барьерного средства в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, общественных и торговых организациях, в транспорте, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем во время эпидемий и при чрезвычайных ситуациях.

Срок годности: не менее 5 лет.
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание: не подлежат.
После применения утилизировать.

Партия № 0005375