

NEO THREAD (PLLA)

1

Mono/Screw Thread

- Основы Mono Thread
- Сравнительные данные
- Характеристика

2

Multi Thread

- Основы Multi Thread
- Состав
- Преимущества
- Сравнительные данные
- Характеристика

3

Cog Thread


- Основы Cog Thread
- Основы нитей для носа
- Характеристика



Что такое PLLA?

PLLA – это универсальный, биоразлагаемый термопластичный материал, получаемый на основе молочной кислоты.

PLLA нити стимулируют неоколлагенез и усиливают пролиферацию фибробластов

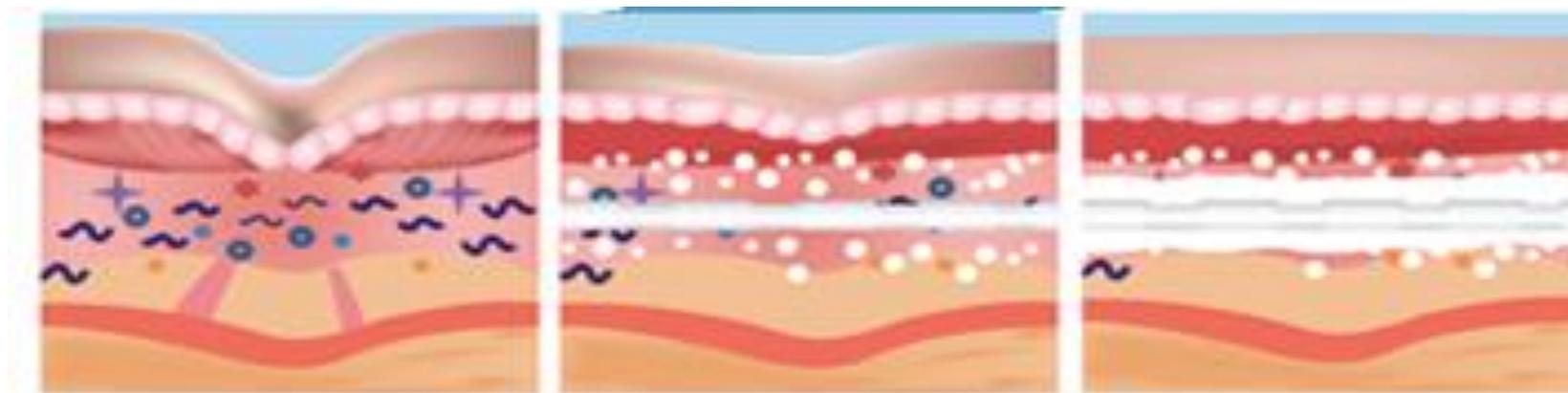

PLLA индуцирует синтез коллагена, пролиферирующий фибробласт.

Одним из основных преимуществ использования PLLA нитей является длительность эффекта лифтинга. Для сравнения, нити PDO полностью рассасываются через 6-8 месяцев после имплантации, нити PLLA - через 12 месяцев, однако благодаря стимуляции неоколлагенеза и усилению пролиферации фибробластов, результаты применения из полимолочной кислоты сохраняются до 18 месяцев.

➤ **PLLA нити и PDO нити имеют несколько общих характеристик:**

- все они быстро фиксируются в тканях;
- со временем рассасываются;
- механическое натяжение тканей;
- стимуляция синтеза коллагена.

➤ **Среди дополнительных преимуществ PLLA нитей можно выделить высокий эффект следующих процедур:**

- лифтинг обвисших бровей;
- коррекция щёк и скул;
- устранение провисших тканей шеи;
- коррекция овала лица.




Основным преимуществом применения PLLA нитей является мгновенный результат, длительный эффект и высокая безопасность.




NEO MONO & SCREW THREAD

Контур лица, двойной подбородок, контур тела(шеи, груди, ягодиц)

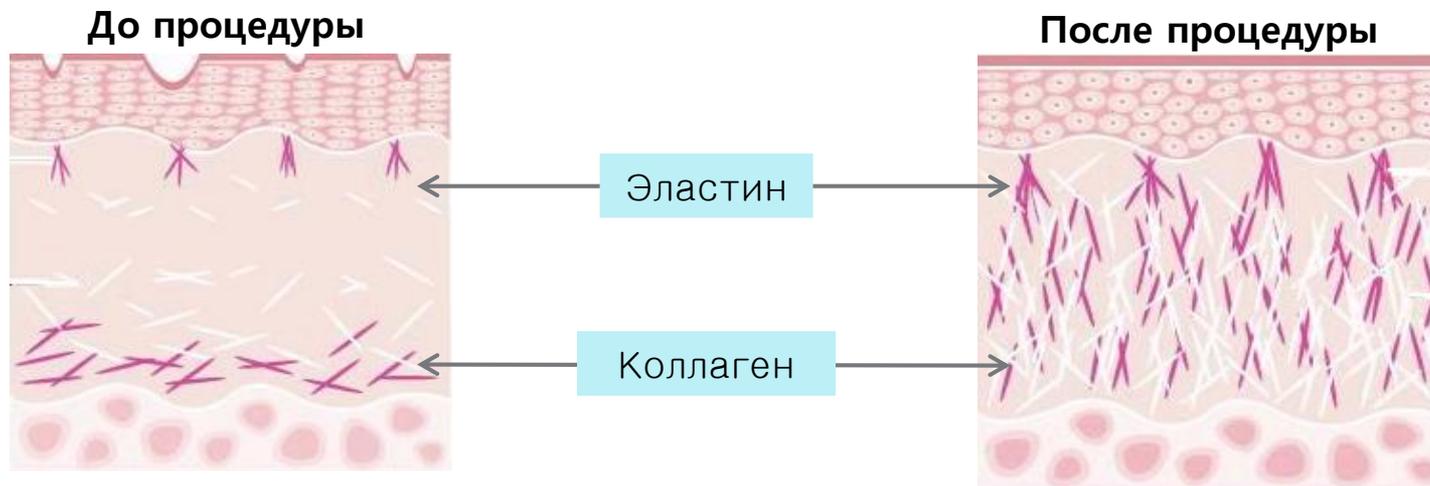


Старение кожи прогрессирует создавая мелкие морщины на ней, разрушая эластин и коллаген

Благодаря обновлению клеток, эластин и коллаген уплотняются

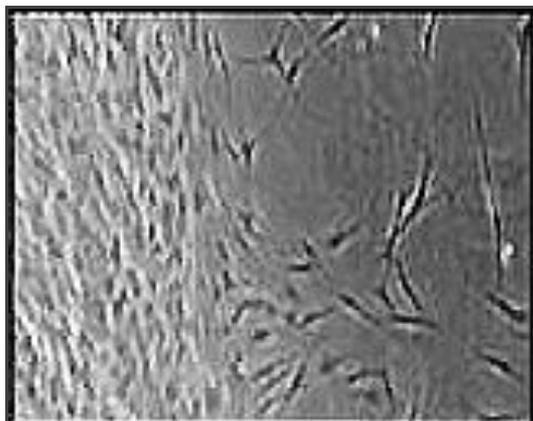


Состояние кожи до инъекции

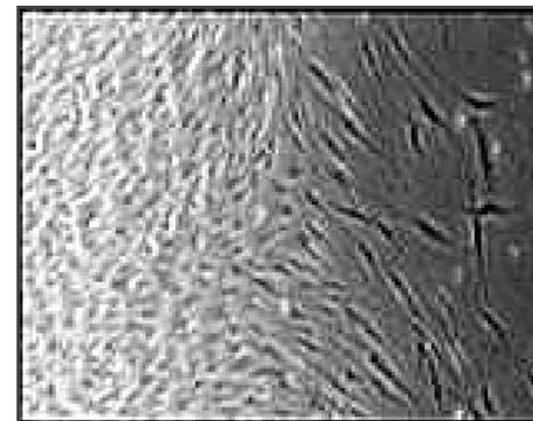

Состояние кожи после инъекции

Уже через 3-4 недели после тредлифтинга с помощью PLLA нитей в коже стимулируется выработка нового коллагена

- ★ Иммунная система распознает вставленную нить как инородное тело, и пытается защитить тело удалив его. Этот процесс порождает **аксеническую воспалительную реакцию, образование коллагена и активный приток крови в дермисе**. Эти реакции в конечном итоге провоцируют улучшение кожи. Кроме того, натяжение инъекционных нитей вызывают **эффект подъема**.

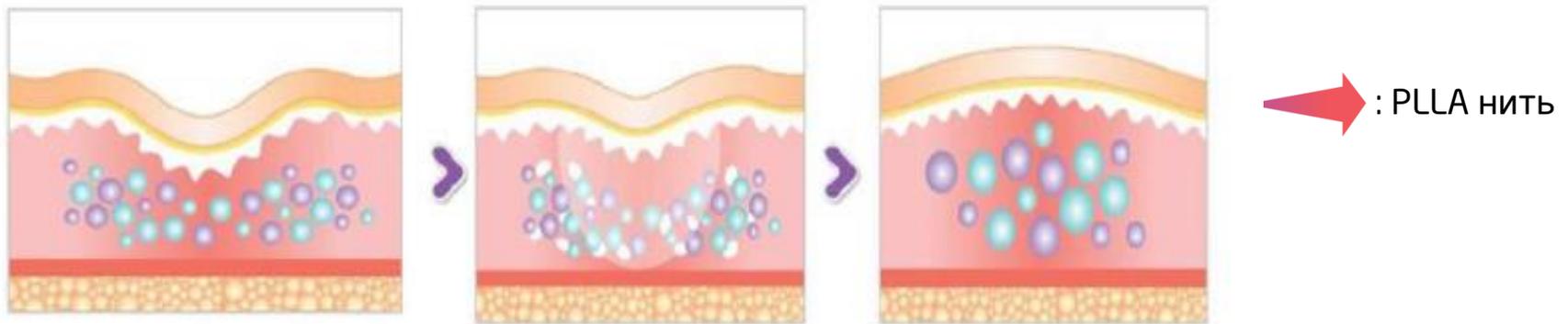

- * Вставленные нити полностью всасываются за 12 месяцев, но **собранные капсулы коллагена остаются**.

Виды Mono Thread

| Модель | Игла | Длина иглы | Длина нити | Толщина нити |
|--------|------|------------|------------|--------------|
| M2925 | 29G | 25.4mm | 30mm | 6-0 |
| M2938 | 29G | 38mm | 50mm | 6-0 |
| M2950 | 29G | 50mm | 70mm | 6-0 |
| M2960 | 29G | 60mm | 90mm | 6-0 |
| M2738 | 27G | 38mm | 50mm | 6-0 |
| M2750 | 27G | 50mm | 70mm | 6-0 |
| M2760 | 27G | 60mm | 90mm | 6-0 |
| M2638 | 26G | 38mm | 50mm | 6-0 |
| M2650 | 26G | 50mm | 70mm | 6-0 |
| M2660 | 26G | 60mm | 90mm | 6-0 |
| M2690 | 26G | 90mm | 150mm | 6-0 |


- Доступна модель для глаз NEO Eye Thread (Mono/Cannula)

| | | | | |
|---------|-----|------|------|-----|
| M2938-C | 29G | 38mm | 50mm | 6-0 |
|---------|-----|------|------|-----|

Компонент : нити PLLA

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры

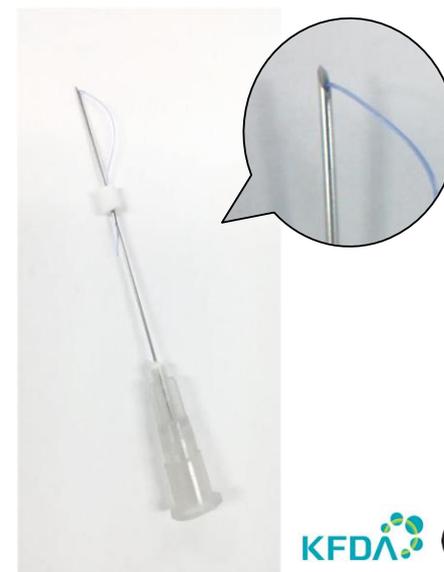

KFDA CE



Иллюстрация модели M2960

Виды Screw Thread

| Модель | Игла | Длина иглы | Длина нити | Толщина нити |
|--------|------|------------|------------|--------------|
| S2925 | 29G | 25.4mm | 30mm | 6-0 |
| S2938 | 29G | 38mm | 50mm | 6-0 |
| S2950 | 29G | 50mm | 70mm | 6-0 |
| S2750 | 27G | 50mm | 70mm | 6-0 |
| S2760 | 27G | 60mm | 90mm | 6-0 |
| S2660 | 26G | 60mm | 90mm | 6-0 |
| S2690 | 26G | 90mm | 150mm | 6-0 |

- Доступна модель для глаз NEO Eye Thread (Screw/Cannula)

| | | | | |
|---------|-----|------|------|-----|
| S2938-C | 29G | 38mm | 50mm | 6-0 |
|---------|-----|------|------|-----|

Компонент : нити PLLA

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры
Моно нить скручена на игле, что увеличивает натяжность инъекции

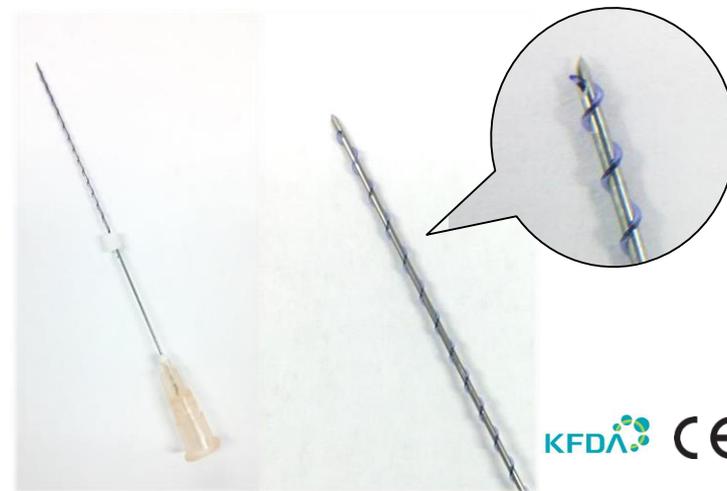


Иллюстрация модели S2750




NEO MULTI THREAD

(Twin, Triple, Tornado Screw)

Удаление мелких и глубоких морщин




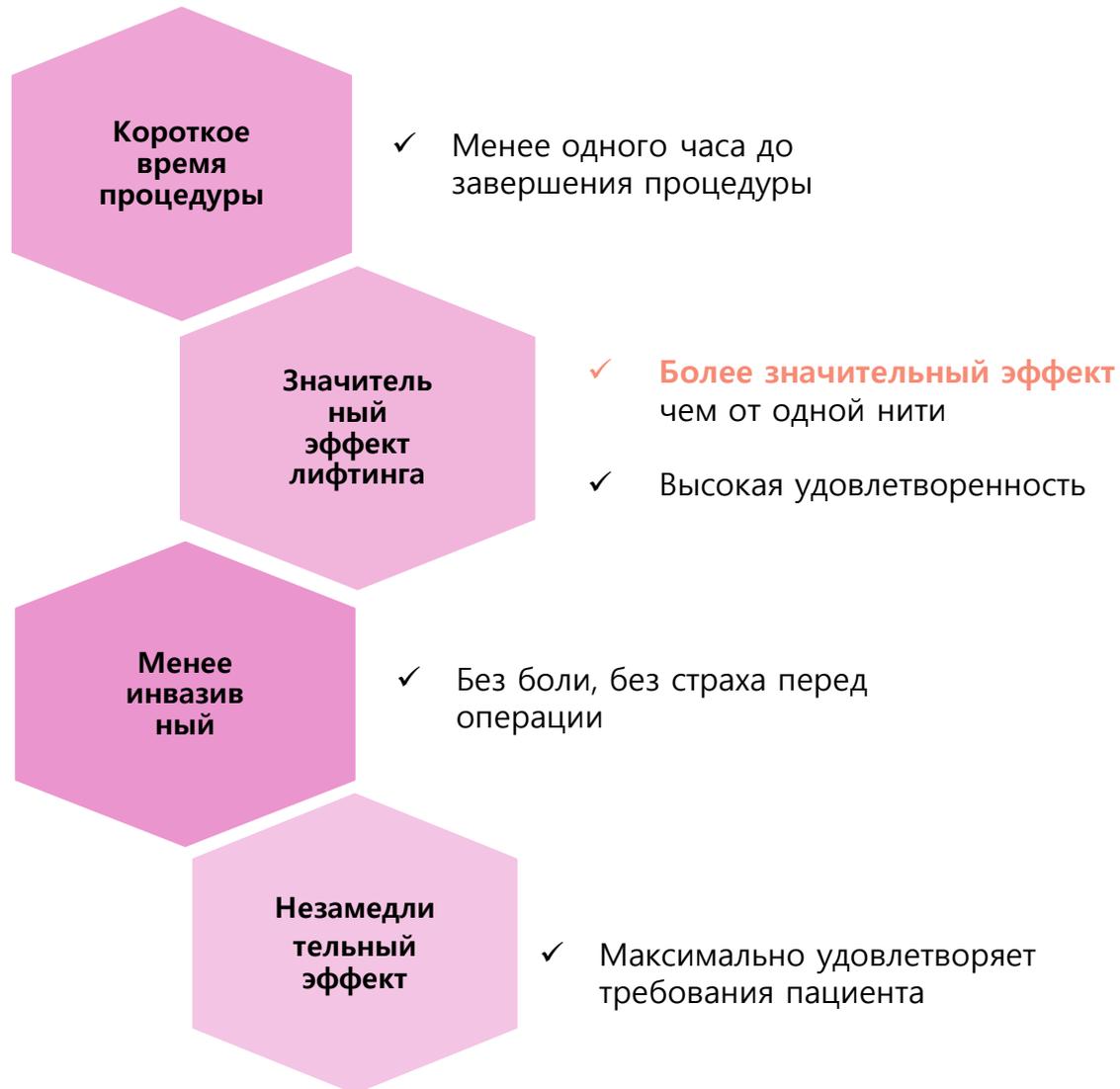

NEO Multi Thread

Двойные нити повышают укрепление клеток (материал PLLA)

Коллаген прогрессирует активацию вокруг и между двойными нитями
основная роль это **повышение эффекта, таких как скорость активации коллагена, восстановление кожи, удаление морщин и т.д.**

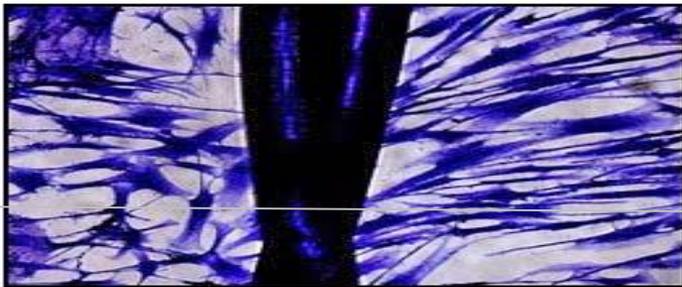


Инъекция только NEO Multi Thread

Другая продукция по лифтингу

Одиная нить (материал PLLA)

Результат не достаточно удовлетворительный из за низкого уровня активации коллагена

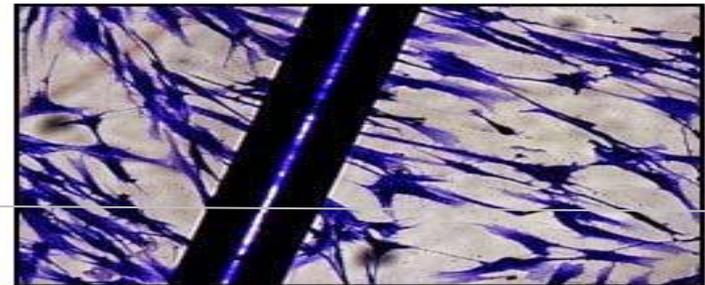

Инъекция обычной продукции для лифтинга

Компонент : нити PLLA

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры
Моно нить скручена на игле, что увеличивает натяжность инъекции

2 скрученные нити

| Модель | Игла | Длина иглы | Длина нити | Толщина нити |
|--------|------|------------|------------|---------------|
| T2738 | 27G | 38mm | 50mm | (7-0) x 2 |
| T2750 | 27G | 50mm | 70mm | (7-0) x 2 |
| T2760 | 27G | 60mm | 90mm | (7-0) x 2 |
| T2638 | 26G | 38mm | 50mm | (7-0) + (6-0) |
| T2650 | 26G | 50mm | 70mm | (7-0) + (6-0) |
| T2660 | 26G | 60mm | 90mm | (7-0) + (6-0) |
| T2690 | 26G | 90mm | 150mm | (7-0) + (6-0) |
| T2560 | 25G | 60mm | 90mm | (6-0) x 2 |
| T2590 | 25G | 90mm | 150mm | (6-0) x 2 |



Иллюстрация модели T2638

Компонент : нити PLLA

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры

Моно нить скручена на игле, что увеличивает натяжность инъекции

3 скрученные нити

| Модель | Игла | Длина иглы | Длина нити | Толщина нити |
|--------|------|------------|------------|-------------------|
| TR2638 | 26G | 38mm | 50mm | (7-0) x 3 |
| TR2650 | 26G | 50mm | 70mm | (7-0) x 3 |
| TR2660 | 26G | 60mm | 90mm | (7-0) x 3 |
| TR2690 | 26G | 90mm | 150mm | (7-0) x 3 |
| TR2560 | 25G | 60mm | 90mm | (7-0) x 2 + (6-0) |
| TR2590 | 25G | 90mm | 150mm | (7-0) x 2 + (6-0) |
| TR2360 | 23G | 60mm | 90mm | (6-0) x 3 |
| TR2390 | 23G | 90mm | 150mm | (6-0) x 3 |



Иллюстрация модели TR2630

Состав нити PLLA

- **Упаковка** : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка
- **Растворяемость** : 12 месяцев после процедуры
- **Скрученные нити вокруг иглы увеличивают натяжение инъекции**

Tornado threads скручены вокруг иглы для поддержки стабильного урегулирования под кожей, а также сильный лифтинг эффект.

Виды Tornado Screw Thread

| Модель | Игла | Длина иглы | Длина нити | Толщина нити |
|--------|------|------------|------------|--------------|
| TS2638 | 26G | 38mm | 50mm | (7-0) x 2 |
| TS2650 | 26G | 50mm | 70mm | (7-0) x 2 |
| TS2660 | 26G | 60mm | 90mm | (7-0) x 2 |
| TS2690 | 26G | 90mm | 150mm | (7-0) x 2 |
| TS2560 | 25G | 60mm | 90mm | (6-0) x 2 |
| TS2590 | 25G | 90mm | 150mm | (6-0) x 2 |



Иллюстрация модели TS2660




NEO COG THREAD

Контур лица, двойной подбородок, контур тела

NEO Cog Thread это нить лифтинга зубчатой формы в виде резьбы, которая была разработана для безопасной и эффективной процедуры лифтинга.

NEO Cog Thread является усовершенствованным методом, по сравнению с контурной нитью для лифтинга, которая была представлена на Американском конгрессе по пластической хирургии.

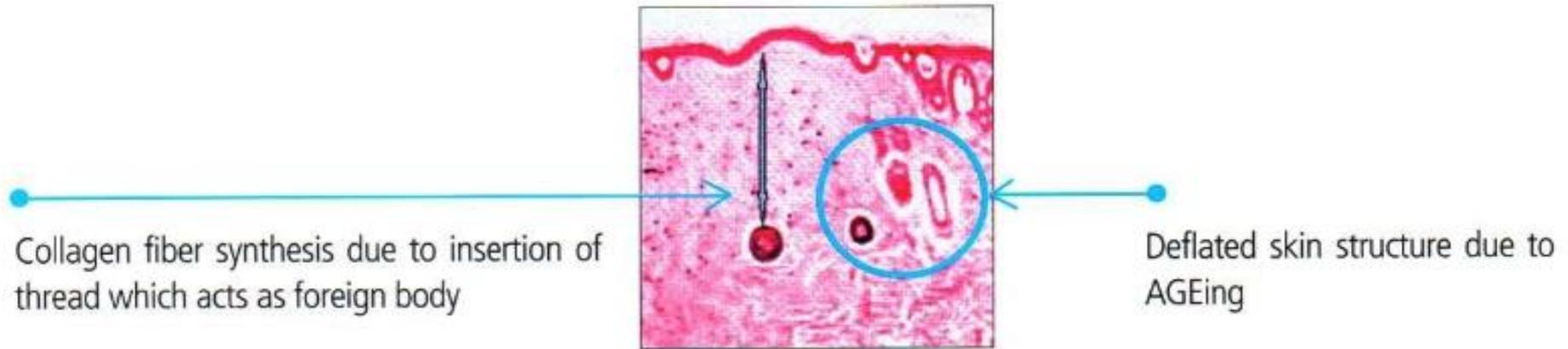

NEO Cog Thread обеспечивает легкий и идеальный способ приподнять отвисшую кожу, подбородок и линии челюсти неинвазивной процедурой

NEO Cog Thread колючкообразные нити, удаляют мелкие и глубокие морщины, провоцируя синтез волокон коллагена


NEO Cog Thread замедляет старение кожи, поддерживая молодость и красоту кожи

Основы NEO Cog Thread

NEO Nose Thread это форма зубчатой нити с шипами для подъема, который стимулирует внутренний процесс становления формы носа.



NEO Nose Thread приводит к подъему носового хребта и усадку основания носа. Это простой и безопасный метод коррекции формы носа, по сравнению с открытой ринопластикой.

Подъем носового хребта

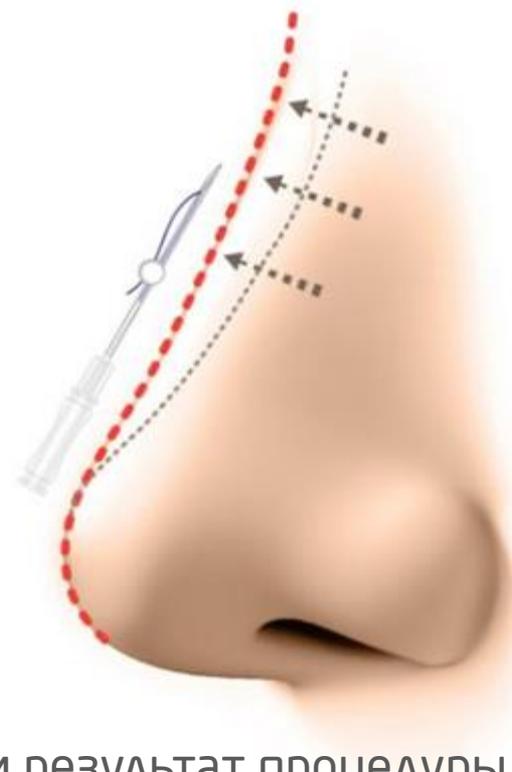

**эффект и результат процедуры

Процедура для кончика носа

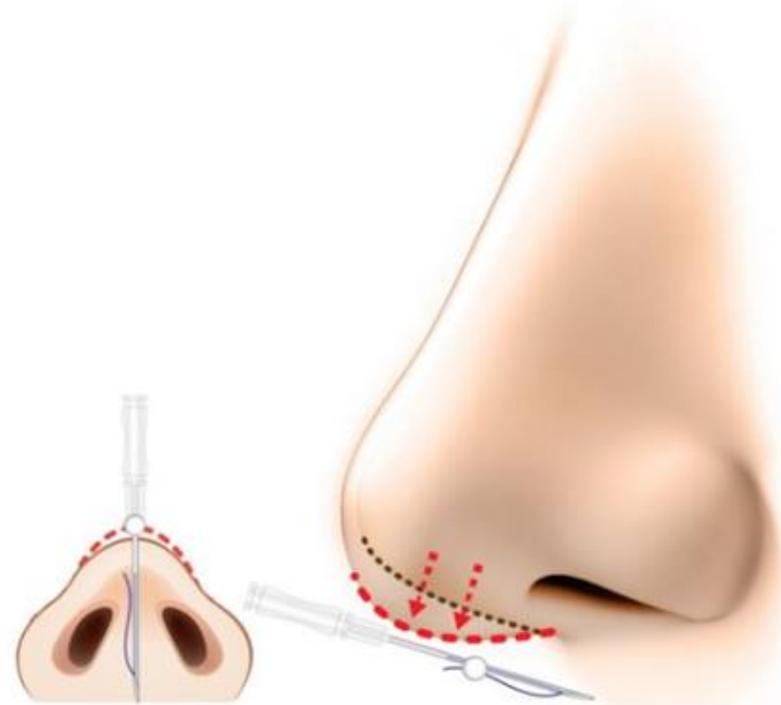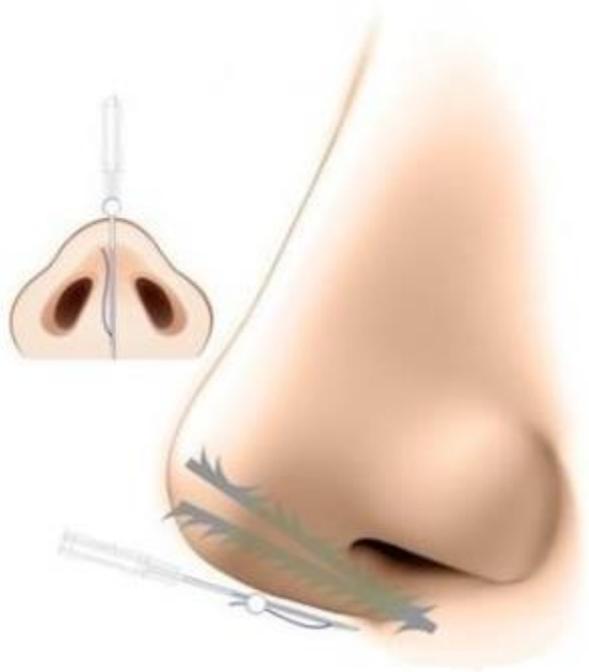

****эффект и результат процедуры.**

- Незамедлительный результат путем размещения множества нитей
- Носовой хребет и кончик приподняты под действием силы тяжести нити (в основном боковые части)
- Различные вставки делают усадку основания носа

Эффекты от процедуры

- Физические изменения: эффект лифтинга и поддержки обвисшей кожи
- физиологические изменения: синтез коллагена

Быстрота процедуры

- мощная интенсивность и продолжительность
- быстрое восстановление
- требуется всего **30 минут** местной анестезии
- без отеков, без синяков

Эффективность лечения

- полупостоянный эффект
- без шрамов и **быстрое восстановление**
- контур угла нижней челюсти
- **удаление морщин на лице**
- повышение тона лица

Состав PLLA

Диаметр : USP 0-0

Форма : шипообразный (резьбообразный)

Направление формы : 360°спираль (двунаправленный)

Вид Cog Thread

| Модель | Игла | Длина иглы | Длина нити | Толщина нити |
|--------|------|------------|------------|--------------|
| C1970 | 19G | 70mm | 110mm | 0-0 |
| C19100 | 19G | 100mm | 140mm | 0-0 |

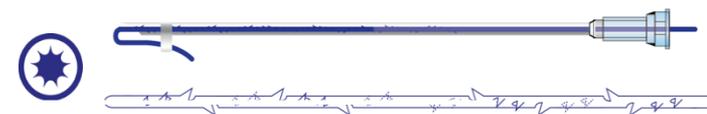


Иллюстрация модели C19100

NEO Thread лист продукции

| Neo | | Neo Multi | | | Neo Cog | |
|---------|---------|-----------|--------|---------------|------------|----------|
| Mono | Screw | Twin | Triple | Tornado Screw | 360-Bi Cog | Cannula |
| M3025 | S3025 | T2738 | TR2638 | TS2638 | C1970 | C1970-C |
| M3038 | S3038 | T2750 | TR2650 | TS2650 | C19100 | C19100-C |
| M2925 | S2925 | T2760 | TR2660 | TS2660 | | |
| M2938 | S2938 | T2638 | TR2690 | TS2690 | | |
| M2950 | S2950 | T2650 | TR2560 | TS2560 | | |
| M2960 | S2750 | T2660 | TR2590 | TS2590 | | |
| M2738 | S2760 | T2690 | TR2360 | | | |
| M2750 | S2660 | T2560 | TR2390 | | | |
| M2760 | S2690 | T2590 | | | | |
| M2638 | S2938-C | | | | | |
| M2650 | | | | | | |
| M2660 | | | | | | |
| M2690 | | | | | | |
| M2938-C | | | | | | |

СПАСИБО

NeoGenesis Co., Ltd.
#302, E&C Dream Tower, 146, Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, South Korea (07255)
Tel. +82-2-583-1348 Fax. +82-2-2038-0848
Homepage: www.neogenesis.co.kr
Email: info@neogenesis.co.kr