

Высококачественные нити PDO для различных процедур

# NEO THREAD SERIES



Мезолифтинг | Антиэйджинг | Безопасность

# Содержание

1. PDO Нити
2. Преимущества нитей NEO
3. Виды мезонитей
4. Серия NEO мезонити
  - NEO нити: Моно / Скрю
  - Мульти Нити: Твин / Трипл / Торнадо Скрю
  - Коги Нити: Коги / Коги для носа / Молдинги
  - Комби Нити: Комби / Нить дабл иглы
  - Спиральные нити плотной скрутки(Cavern Thread )
  - Нити-филлеры
5. Область применения
6. До & После
7. Обучающие видео
8. Перечень моделей

## 1. PDO Нити

# Самая лучшая мезотерапия для объёма и от морщин


### Мгновенный видимый эффект сразу после процедуры

Нити **PDO (полидиоксанон)** состоят из рассасывающегося полимерного шовного материала, который является гибким и прочным, что делает его идеальным материалом для минимально инвазивного омоложения, подтяжки и лифтинга кожи.

Исследования подтвердили, что PDO расслабляет сухожилия и мышцы, в то время как реакция на инородное тело улучшает приток крови к участку, стимулирующему неоколлагенез (производство нового коллагена) в коже.

Нити PDO провоцируют процесс самовосстановления, вводя шовную нить в кожу. Через 6 месяцев она полностью рассасывается, но коллагеновая капсула и пучок остаются.

### Принцип Neo нитей

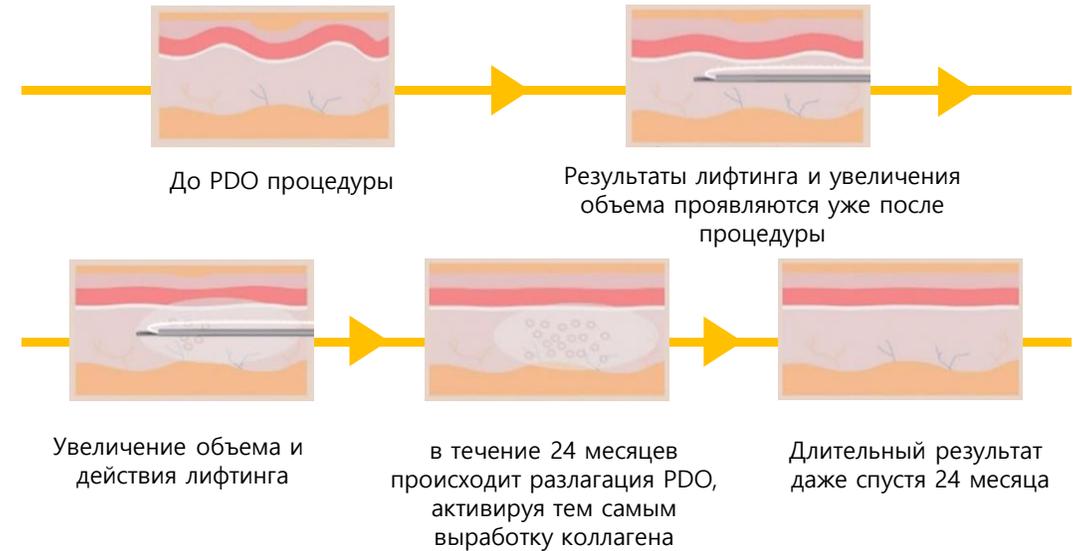

### Преимущества нитей Neo PDO



## 2. Преимущества нитей Neo

**Выбирая мезонити от NEO, Вы делаете самый безопасный и эффективный выбор**

**Иглы со специальным силиконовым покрытием  
Защищают ткани кожи и  
Обеспечивается минимальное повреждение тканей**

Все модели  
произведены и запатентованы  
в Южной Корее

Возможно производство  
дополнительных  
моделей  
(также доступны нити из  
материала PCL, PLLA)



Имеются  
сертификаты  
CE & KFDA

Самый широкий  
ассортимент и  
параметр игл  
(длина, калибр,  
диаметр,  
толщина стенки)

**NEOGENESIS**  
Global Leader Enterprise of Autologous Cell Therapies



Выгодная цена

# 12 видов, 77 моделей для различных процедур

31G~18G, 12mm~550mm – доступны все модели на Ваш выбор

<Область применения нитей NEO>

- Neo Моно Нити(Моно / Скрю): Мелкие морщинки на лице и шее
- Neo Мульти Нити(Твин / Трипл / Торнадо Скрю): Мелкие и глубокие морщины на лице и шее
- Neo Коги Нити(Коги / Коги для Носа / Молдинги): Лицо, двойной подбородок и контур тела
- Neo Комби Нити (Комби / Двойные нити): Лицо, двойной подбородок и контур тела
- Neo Cavern Нити: Все типы морщин на лице и шее
- Neo Нити-филлеры: Мелкие и глубокие морщины на лице и шее




# Моно / скрю: базовая модель для производства коллагена и эластина

## Мягкий лифтинг, ревитализация и подтяжка кожи вокруг лица и шеи

- С данной моделью можете проводить всевозможные процедуры, в зависимости от пожелания пациентов
- Процедуры возможно проводить даже на тонких участках кожи
- Практически безболезненно и без раздражений
- Доступны к заказу атравматичные канюли специально для кожи вокруг глаз

### Моно Нити

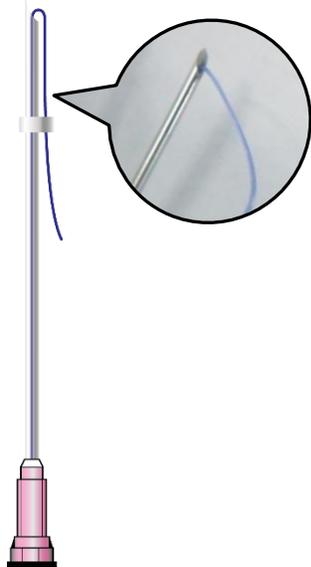

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
M3112	31G	12mm
M3025	30G	25.4mm
<b>M3038</b>	<b>30G</b>	<b>38mm</b>
M2925	29G	25.4mm
<b>M2938</b>	<b>29G</b>	<b>38mm</b>
M2950	29G	50mm
M2960	29G	60mm
M2738	27G	38mm
M2750	27G	50mm
M2760	27G	60mm
M2638	26G	38mm
M2650	26G	50mm
<b>M2660</b>	<b>26G</b>	<b>60mm</b>
<b>M2690</b>	<b>26G</b>	<b>90mm</b>

### Скрю нити



Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
S3025	30G	25.4mm
S3038	30G	38mm
S2925	29G	25.4mm
<b>S2938</b>	<b>29G</b>	<b>38mm</b>
S2950	29G	50mm
<b>S2750</b>	<b>27G</b>	<b>50mm</b>
S2760	27G	60mm
<b>S2660</b>	<b>26G</b>	<b>60mm</b>
<b>S2690</b>	<b>26G</b>	<b>90mm</b>

**Данные модели доступны также в виде канюль (моно / скрю канюля)**

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
<b>M2938-C</b>	<b>29G</b>	<b>38mm</b>
S2938- C	29G	38mm


# Твин / Трипл / Торнадо Скрю

Благодаря своему дизайну (структуре) мезонити поддерживают работу клеток и помогают коллагену проводить синтез

- Косички: 2 витые нити
- Трипл: 3 витые нити
- Косичка по спирали: 2 скрученные нити вокруг иглы


Идеально подходит для глубоких морщин и подтяжки лица и шеи

## Твин

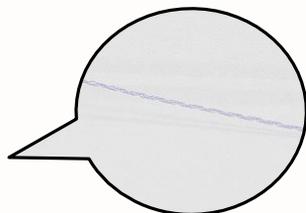


Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
T2738	27G	38mm
T2750	27G	50mm
T2760	27G	60mm
T2638	26G	38mm
T2650	26G	50mm
T2660	26G	60mm
T2690	26G	90mm
T2560	25G	60mm
T2590	25G	90mm

## Трипл

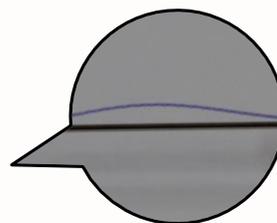

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
TR2638	26G	38mm
TR2650	26G	50mm
TR2660	26G	60mm
TR2690	26G	90mm
TR2560	25G	60mm
TR2590	25G	90mm
TR2360	23G	60mm
TR2390	23G	90mm

## Торнадо скрю

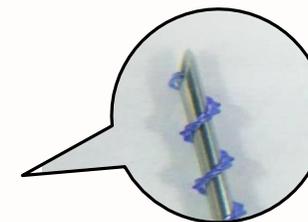


Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
TS2638	26G	38mm
TS2650	26G	50mm
TS2660	26G	60mm
TS2690	26G	90mm
TS2560	25G	60mm
TS2590	25G	90mm

# Твин / Трипл / Торнадо Скру : возможность проводить комбинированные процедуры

## Специальная конструкция с наконечником Luer-Lock для сложных процедур



Во время комбинированных процедур со стволовыми клетками и с PRP, скрученные мульти нити NEO позволяют создать эффект сосудистого каркаса. Клетки кожи начинают активнее производить коллаген., а также пациенты получают максимальный результат от лечения.

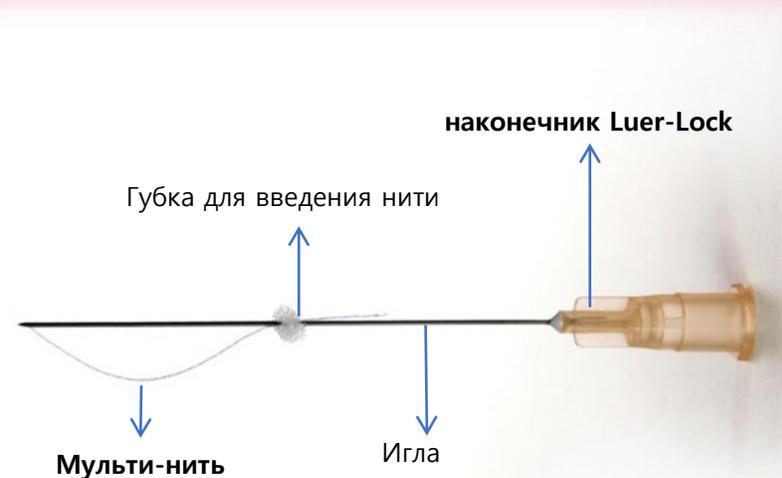

Мульти нити NEO

Комбинированные процедуры возможны благодаря наконечнику Luer-lock

### Advances in Progenitor Cell Therapy Using Scaffolding Constructs for Central Nervous System Injury

#### 1. Scaffold Implantation

Cellular therapy will likely require the introduction of progenitor cells *en masse*. Engineered scaffolding constructs must supply structural and microenvironmental support to direct and maintain the viability of implanted progenitor cells.

The intimate relationship between structure and function makes tissue scaffolding an exercise in **creating shapes that match the functional goals of therapy and cellular engraftment.**

#### 2. Polydioxanone [PDO]

PDO is a flexible synthetic, absorbable polymer that **has been used in the construction of scaffolds and suture material** (PDS). It degrades via hydrolysis at a moderate rate (approximately 6 months) and is believed to have little immunological and inflammatory reactivity.

PDO based scaffolds have been engineered with electrospinning and utilized for the construction of vascular grafts, repair of tendon and bony defects, and as nerve guides. **Complexing PDO based polymers with natural polymers (i.e., elastin) allows for increased bioreactivity and tissue in-growth.** Composite PDO/elastin constructs could offer potential enhancement of progenitor cell viability and function.


(Stem Cell Rev. 2009 September; 5(3): 283–300.)  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2874887/>

# Коги: Нити с двунаправленными насечками обеспечивают выраженный лифтинг-эффект

инновационный и при этом  
малотравматичный скульптор лица

360° 9D Barbs

Нити коги NEO

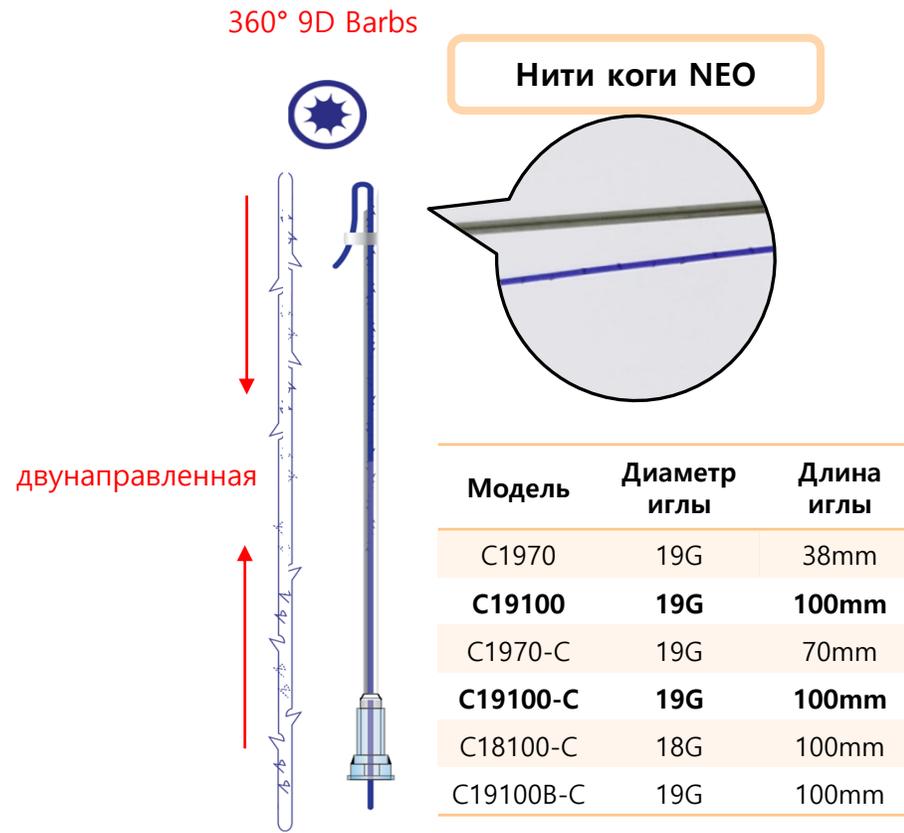



двунаправленная

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
C1970	19G	38mm
<b>C19100</b>	<b>19G</b>	<b>100mm</b>
C1970-C	19G	70mm
<b>C19100-C</b>	<b>19G</b>	<b>100mm</b>
C18100-C	18G	100mm
C19100B-C	19G	100mm

- Разглаживание мелких морщинок
- Мощный синтез коллагеновых волокон
- Шиповидная форма нитей позволяет сформировать каркас, подтягивающий контур лица, что обеспечивает безопасные и эффективные процедуры.
- Нити коги от NEO обеспечивают очень длительную и стойкую фиксацию и подтяжку тканей, особенно в области линии подбородка
- Доступны модели с канюлями (тупой кончик иглы)

# Нити для носа: Однонаправленные коги для изменения формы носа

Канюля типа L обеспечивают лёгкое прокалывание и не повреждают мягкие ткани

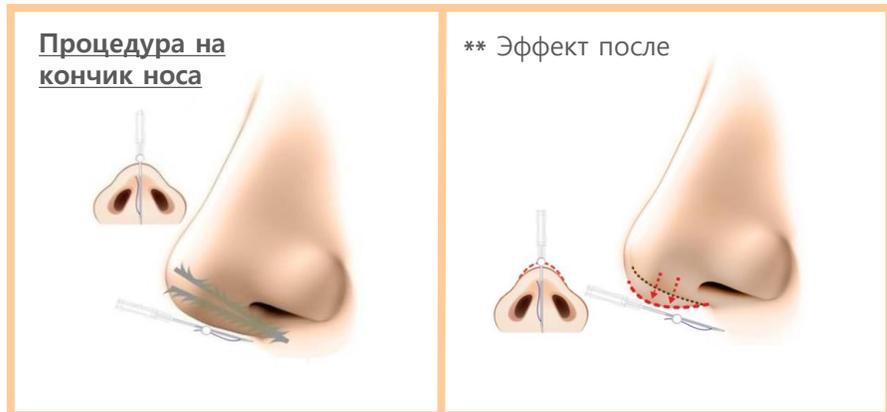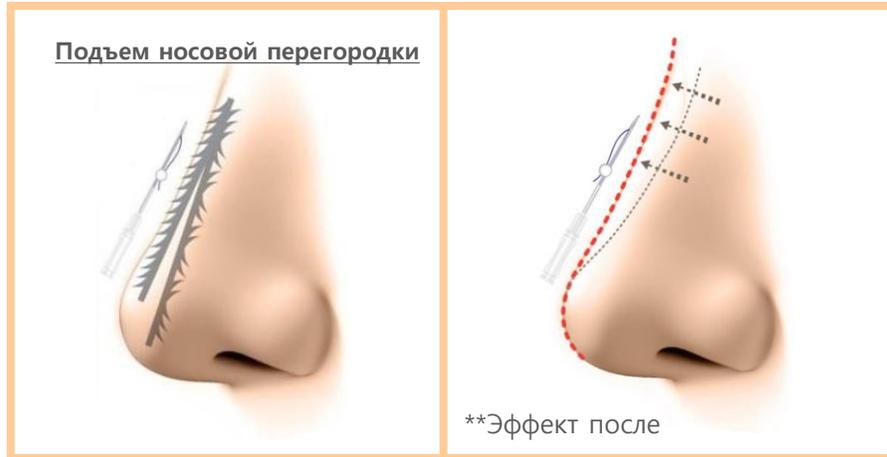


## Нити коги для носа NEO



Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
C1938-C	19G	38mm
C1950-C	19G	50mm

- Минимально инвазивный подход для коррекции формы носа
- Помогут выровнять носовую перегородку и немного сузить крылья носа
- Быстрое образование рубцовой ткани на поверхности кожи действует как биологический клей
- Подтягивание мягких тканей

## Канюля: L-вид

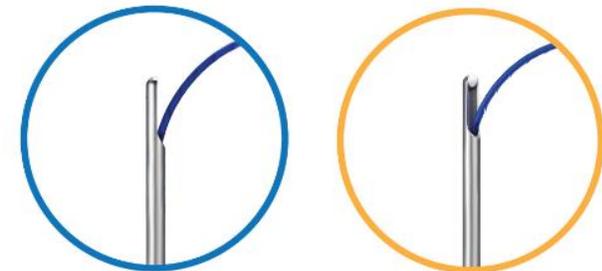


- Канюли с тупым концом L-типа используются для моделей на нос.

# Нити Молдинги: литые и прессованные Изготовленные по особому методу прессования


Форма крупных насечек помогает создать максимальный эффект подтяжки лица

Молдинги нити NEO

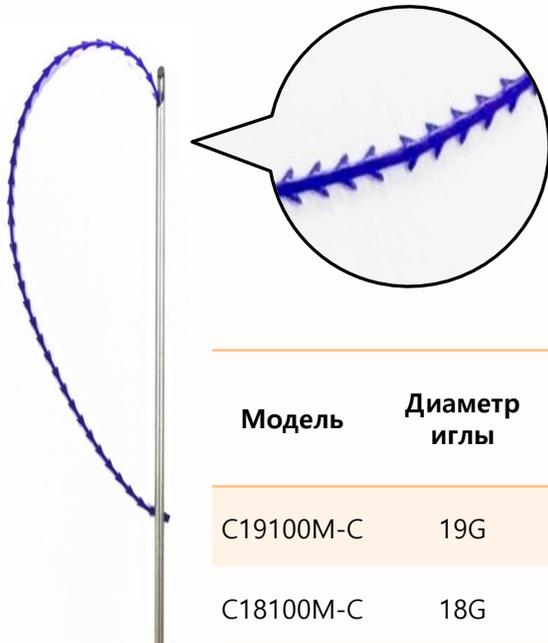

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
C19100M-C	19G	100mm
C18100M-C	18G	100mm

- Зубцовые насечки были изготовлены в форме наконечника стрелы
- Помогают скорректировать лицевой овал за счёт плотного закрепления
- После имплантации литых нитей с насечками не остается никаких следов на коже.

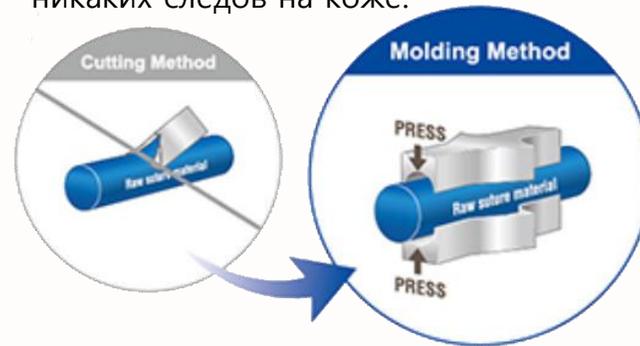

\* В отличие от других нитей с насечками, нити Молдинги производятся методом прессования, что позволяет достичь более длительного эффекта подтяжки кожи.

Канюля: W-тип




- В данной модели используются канюли типа W-Type

# Нити комби: - надежно фиксируют каркас тканей благодаря структуре с разнонаправленными насечками 360°

Благодаря высокой гибкости такие иглы позволяют доктору моделировать ткани на нужной глубине

- Данные нити надежно фиксируют каркас тканей благодаря своей структуре с разнонаправленными насечками 360°
- Доступны модели с канюлями (тупой кончик иглы)

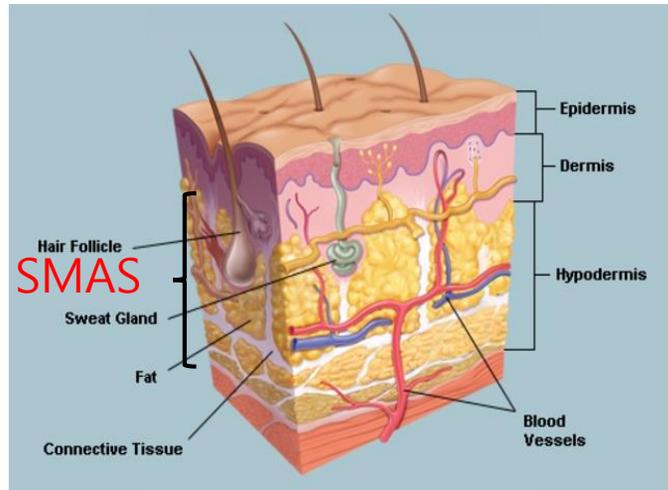

SMAS слой находится между подкожным жировым слоем и слоем мышц. **Опущение слоя SMAS** известна как **основная причина морщин на лбу, шее, подбородке и рта**

NEO Комби нити- мезонити с насечками-используют технику иглоукалывания, чтобы стимулировать не только кожу, но и мышечный слой, сгруппировать обвисшие мышцы и создать внутреннюю и внешнюю красоту.

Разнонаправленная


4D Barbs

Нити комби от NEO



Модель	Диаметр иглы	Длина иглы
B2360	23G	60mm
B2390	23G	90mm
B2160	21G	60mm
B2190	21G	90mm
B2360-C	23G	60mm
B2390-C	23G	90mm
B2160-C	21G	60mm
B2190-C	21G	90mm

Нить на двух иглах от NEO

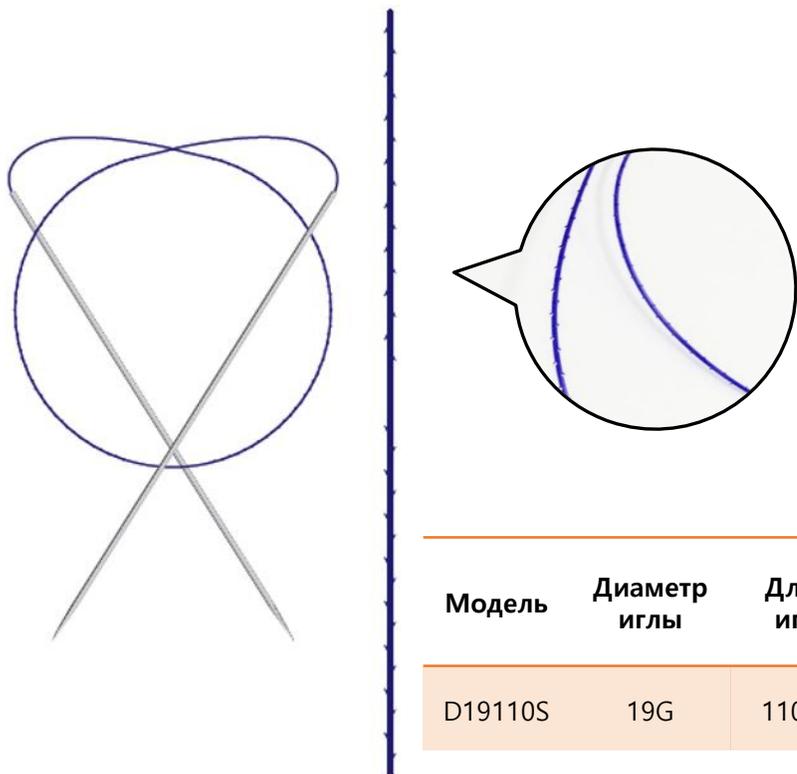

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Длина нити
D19110S	19G	110mm	290mm
D19110L	19G	110mm	440mm

# Дабл иглы: Испытайте абсолютно новые процедуры нитевого лифтинга

Специально разработаны для моделирования тканей в любых направлениях, включая те участки лица и тела, которые были недоступны другим технологиям


- Максимальная подтяжка, поднятие опустившихся тканей
- Разнонаправленные насечки 360 ° для более прочного крепления
- Помогут разгладить дряблую кожу и вернуть упругость тканям
- Применимы при морщинах на лбу, шеи, появлении второго подбородка, углублении носогубных складок. Также при обвисании кожи груди, рук и ягодиц

# Спиральные мезонити плотной скрутки: Оптимальное решение от глубоких морщин

Наиболее активно стимулирует выработку коллагена за счет плотно скрученного вокруг иглы полидиоксанона

- Более длительный и мощный объем за счет сильной эластичности
- С помощью данных нитей Вы сможете проводить лёгкие процедуры за довольно короткое время
- **Максимальное образование коллагена в и за пределами нити**
- Для всех видов морщин

NEO Cavern Thread

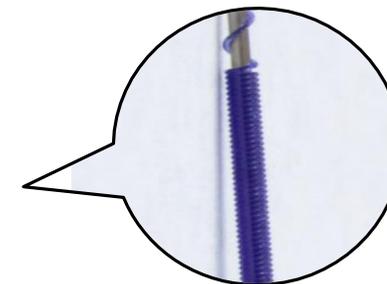

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Длина нити
V2950-C	29G	50mm	320mm
V2750-V	27G	50mm	310mm
V2550-V	25G	50mm	410mm
V2360-C (5-0)	21G	60mm	5500mm
V2260-C (4-0)	21G	60mm	450mm
V2160-C (4-0)	23G	60mm	440mm
V2160-C (3-0)	23G	60mm	280mm

# Нити-филлеры: тредлифтинг для удаления глубоких морщин

Нити-филлеры от NEO



Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Длина нити
TF2338-C	23G	38mm	50mm
TF2360-C	23G	60mm	90mm

При работе такими мезонитями отсутствует риск разрыва нити и соскальзывания тканей.

- Одна игла содержит **20 мезонитей**.
- **Короткая процедура для экономии вашего времени**
- Способствует выработке **коллагена и эластина**
- Повышенная плотность нитей **стимулирует активность тканей и фибробластов**
- Подходят для биоармирования небольших зон, уголков рта, гусиных лапок, мешков под глазами, уголков глаз и линий шеи

## 5. Область применения


**С помощью мезонитей от NEO можно сохранить красоту и упругость кожи, избавиться от морщин, вернуть четкость всем контурам лица.**

Face line	Cheek	Neck
 25mm, 38mm	 25mm, 38mm	 25mm, 38mm, 50mm, 70mm
 25mm, 38mm, 50mm	 50mm, 70mm	 25mm, 38mm, 50mm
Breast	Abdominal	Forearm
 38mm, 50mm, 70mm, 90mm	 70mm, 90mm	 90mm
Love handle	Hip	Calf
 70mm, 90mm	 38mm, 50mm, 70mm, 90mm	 38mm, 50mm, 70mm, 90mm


Мезонити позволяют добиться  
впечатляющего лифтинг-эффекта  
без хирургического вмешательства



До

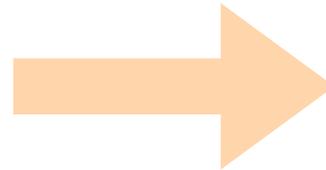

Нити-коги для носа  
от NEO

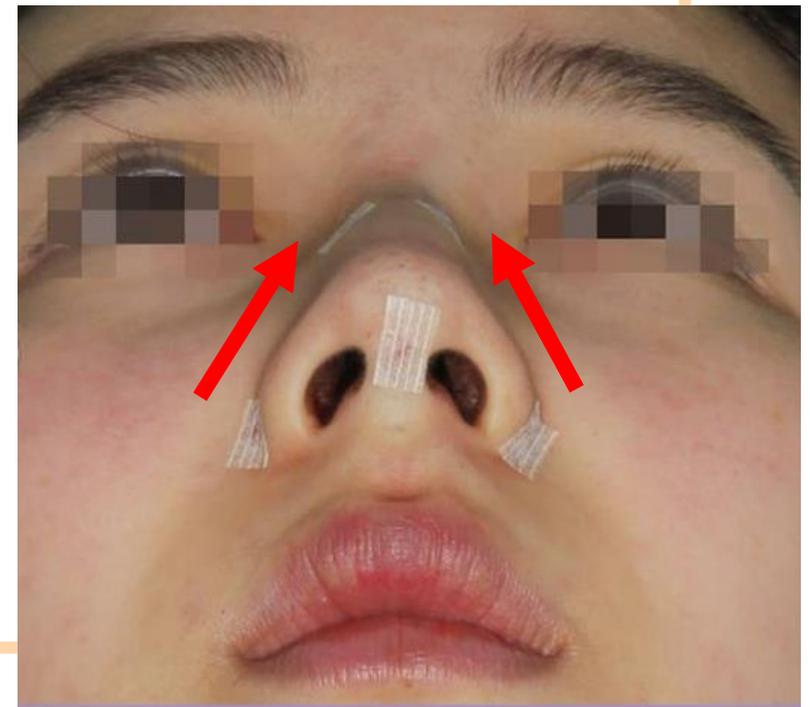


После

Полноценное изменение контуров лица  
**Четкий контур лица и заметная  
подтяжка кожи**



До

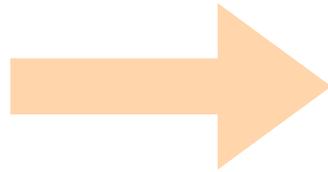

Нити-коги от NEO



После

Результат заметен почти сразу и сохраняется надолго

# Тредлифтинг носогубных складок и под глазами



До




NEO Cavern Thread




После

# Исправление асимметрии лица и носогубных складок

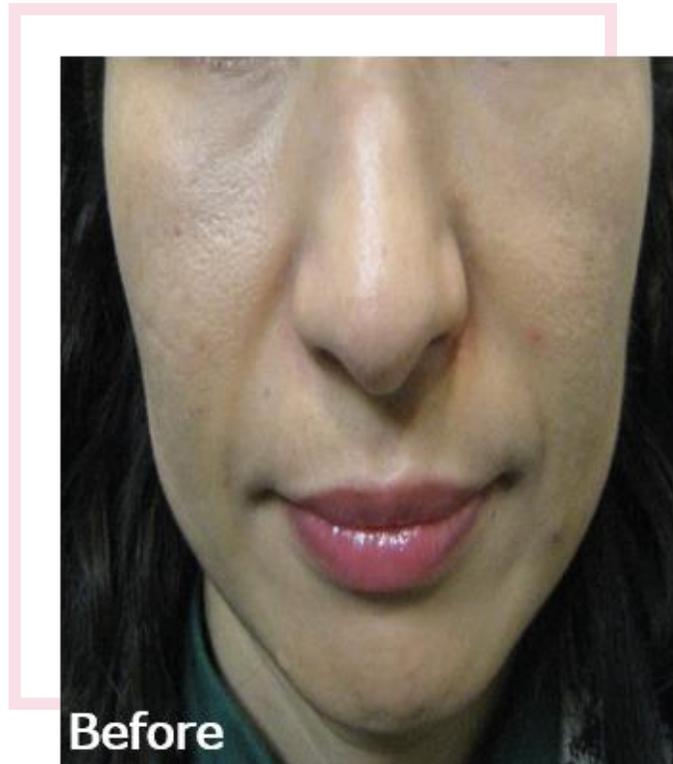

До

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


Мульти нити NEO




После

# Антивозрастные процедуры: Заполнение объёмов тканей и

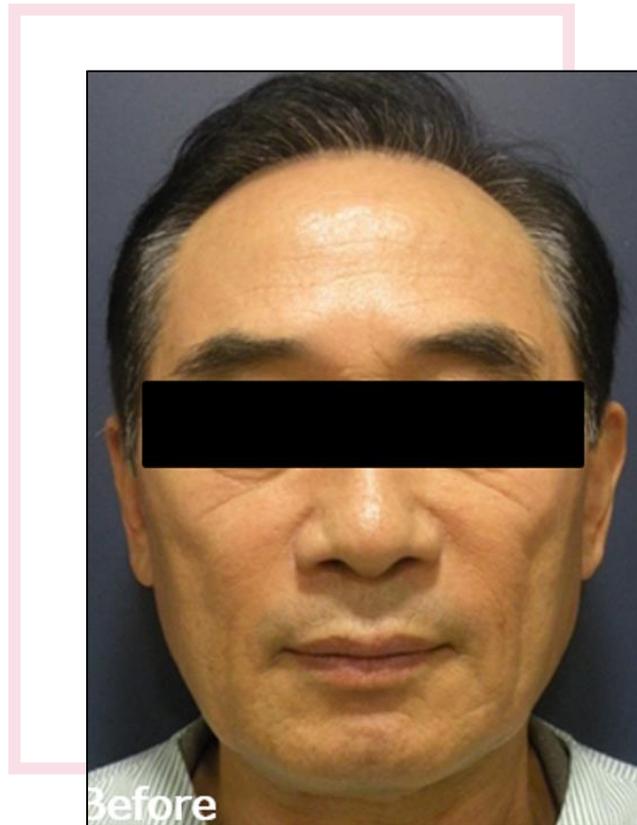

До

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

Мульти нити Neo +  
Стволовые клетки + PRP



После

## 7. Обучающие видео

# Обучающие видео на нашем канале

### NEO THREAD SERIES

NEO Thread Lifting - 1 (Лицо)

<http://youtu.be/jveCUh9OloY>

NEO Thread Lifting - 4 (Лицо/Тренинг)

<http://youtu.be/qN1T-AO11jA>

### NEO МУЛЬТИНИТИ

NEO Multi Thread Lifting - 1 (Стеловые клетки и PRP)

<http://youtu.be/vGnbozJKBGw>

NEO Multi Thread Lifting - 2 (Стеловые клетки и PRP)

<http://youtu.be/blZhoV5AqYM>



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ  
канал на Youtube

### NEO КОГНИТИ

Cog Thread введение и тренинг

<https://youtu.be/8aMFLgsDitU>

### NEO КОМБИНИТИ

NEO Combi Thread Lifting - 1 (Лицо)

NEO Combi Thread Lifting - 2 (тренинг / Лицо)

<http://youtu.be/xFvXNFUKYnU>

NEO Combi Thread Lifting - 3 (тренинг / Тело)

<http://youtu.be/y0FXmfdN6uk>



NeoGenesis Co., Ltd.

구독자 715명

# Широкий ассортимент мезонитей

Название	Диаметр иглы	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити	модель
Моно (Одна нить)	31G	12mm	16mm	7-0	M3112
	30G	25.4mm	30mm	7-0	<b>M3025</b>
		38mm	50mm	7-0	M3038
	29G	25.4mm	30mm	6-0	M2925
		38mm	50mm	6-0	<b>M2938</b>
		50mm	70mm	6-0	M2950
		60mm	90mm	6-0	M2960
	27G	28mm	50mm	5-0	M2738
		50mm	70mm	5-0	M2750
		60mm	90mm	5-0	M2760
	26G	38mm	50mm	5-0	M2638
		50mm	70mm	5-0	M2650
		60mm	90mm	5-0	<b>M2660</b>
		90mm	150mm	5-0	<b>M2690</b>
Screw (одна нить)	30G	25.4mm	30mm	7-0	S3025
		38mm	50mm	7-0	S3038
	29G	25.4mm	30mm	6-0	S2925
		38mm	50mm	6-0	<b>S2938</b>
		50mm	70mm	6-0	S2950
	27G	50mm	70mm	5-0	<b>S2750</b>
		60mm	90mm	5-0	S2760
	26G	60mm	90mm	5-0	<b>S2660</b>
		90mm	150mm	5-0	<b>S2690</b>
	Канюли для глаз (Mono / Screw)	29G	38mm	50mm	6-0
38mm			50mm	6-0	<b>S2938-C</b>

Название	Диаметр иглы	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити	модель
Multi: Twin (две нити)	27G	38mm	50mm	(7-0) x 2	<b>T2738</b>
		50mm	70mm	(7-0) x 2	<b>T2750</b>
		60mm	90mm	(7-0) x 2	T2760
	26G	38mm	50mm	(7-0)+(6-0)	T2638
		50mm	70mm	(7-0)+(6-0)	T2650
		60mm	90mm	(7-0)+(6-0)	<b>T2660</b>
		90mm	150mm	(7-0)+(6-0)	<b>T2690</b>
	25G	60mm	90mm	(6-0) x 2	T2560
		90mm	150mm	(6-0) x 2	T2590
		26G	38mm	50mm	(7-0) x 3
50mm	70mm		(7-0) x 3	TR2650	
60mm	90mm		(7-0) x 3	<b>TR2660</b>	
90mm	150mm		(7-0) x 3	<b>TR2690</b>	
Multi: Triple (три нити)	25G	60mm	90mm	(7-0)x2+(6-0)	TR2560
		90mm	150mm	(7-0)x2+(6-0)	TR2590
	23G	60mm	90mm	(6-0) x 3	TR2360
		90mm	150mm	(6-0) x 3	TR2360
Multi: Tornado Screw (две нити)	26G	38mm	50mm	(7-0) x 2	<b>TS2638</b>
		50mm	70mm	(7-0) x 2	<b>TS2650</b>
		60mm	90mm	(7-0) x 2	<b>TS2660</b>
		90mm	150mm	(7-0) x 2	TS2690
	25G	60mm	90mm	(6-0) x 2	TS2560
		90mm	150mm	(6-0) x 2	TS2590

Название	Диаметр иглы	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити	модель	
Нити кожи (360-Bi)	19G	70mm	110mm	0-0	C1970	
		100mm	140mm	0-0	<b>C19100</b>	
Коги канюли (360-Bi)	19G	70mm	110mm	0-0	C1970-C	
		100mm	140mm	0-0	<b>C19100-C</b>	
Коги канюли (Bi-Directional)	19G	100mm	140mm	1	C19100B-C	
		38mm	50mm	2	<b>C1938-C</b>	
Коги на нос (канюля)	19G	50mm	80mm	2	<b>C1950-C</b>	
		100mm	150mm	2	C19100M-C	
Молдингни коги канюля (Arrow-Bi)	19G	100mm	150mm	3	C18100M-C	
		60mm	90mm	3-0	<b>B2360</b>	
Нити комби (360-Multi)	23G	90mm	150mm	3-0	<b>B2390</b>	
		21G	60mm	90mm	2-0	B2160
	21G	90mm	150mm	2-0	B2190	
Комби канюля (360-Multi)	23G	60mm	90mm	3-0	B2360-C	
		90mm	150mm	3-0	B2390-C	
	21G	60mm	90mm	2-0	B2160-C	
Двойные иглы Комби (360-Multi)	19G	90mm	150mm	2-0	B2190-C	
		110mm	290mm	0-0	D19110S	
		110mm	440mm	0-0	D19110L	
Cavern Thread Cannula (эсктра плотной скрутки)	29G	50mm	320mm	6-0	V2950-C	
		27G	50mm	310mm	5-0	<b>V2750-C</b>
		25G	50mm	410mm	5-0	V2550-C
	23G	60mm	550mm	5-0	<b>V2360-C (5-0)</b>	
		60mm	450mm	4-0	V2360-C (4-0)	
	21G	60mm	440mm	4-0	<b>V2160-C (4-0)</b>	
60mm		380mm	3-0	V2160-C (3-0)		
Нити Филлеры	23G	38mm	50mm	6-0	TF2338-C	
		60mm	90mm	6-0	TF2360-C	

❖ Толстым шрифтом отмечены часто используемые модели

# NEO НИТИ- ЛУЧШИЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!