

Ручной инжектор LeFil



Что такое LeFil ?

LeFil – это компактный ручной инжектор, предназначенный для введения ГК и других препаратов для ухода за кожей в необходимом количестве, дозируемый вручную.

LeFil предназначен для простого и лёгкого проведения инъекционных процедур. В процессе производства аппарата применялись самые передовые технологии в мире.

Инжектор LeFil является высокоэффективным, оптимальным по цене, а также совместим со шприцами множеств различных брендов.



Состав аппарата



Основа инжектора

Насадка с 5 иглами
(Приобретается
отдельно)



Насадка с 9 иглами
(5шт в наборе)



Приёмный
фильтр (2шт)



Дополнительный
модуль для закачки



Зарядное устройство




Описание аппарата



Преимущества

1. Равномерное и непрерывное введение

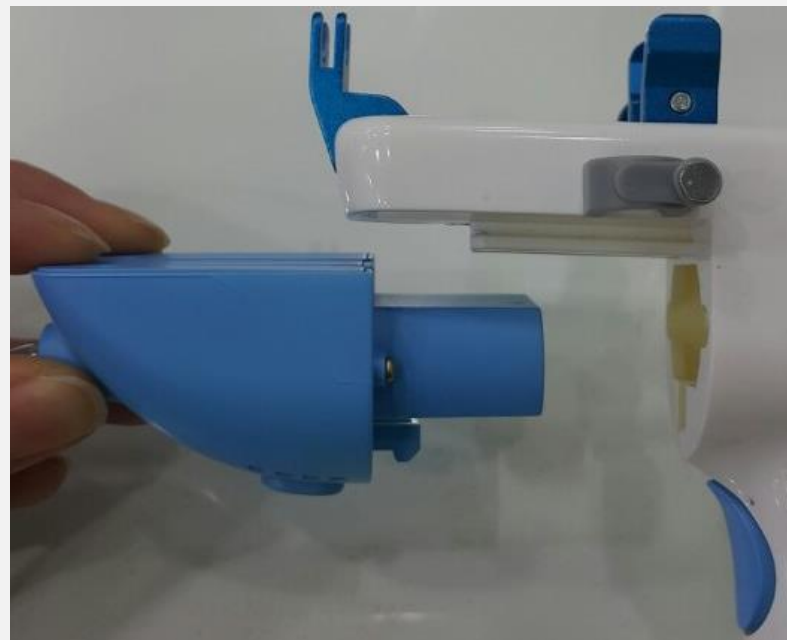

2. Возможность быстрой и лёгкой замены модуля для закачки

Преимущества

3. Беспроводной, с
возможностью перезарядки



4. Наличие технологии для
предотвращения обратного хода и
потерь вводимого препарата

Преимущества

5. Возможность применения насадок с 5 и 9 иглами (31G)




5 игл (31G)
(регулируемая глубина введения)




9 игл (31G)

6. Надёжность


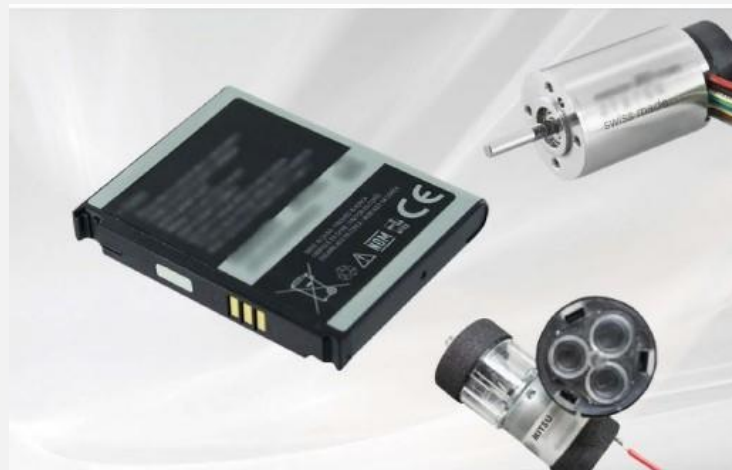


Насадки с регулируемой глубиной введения

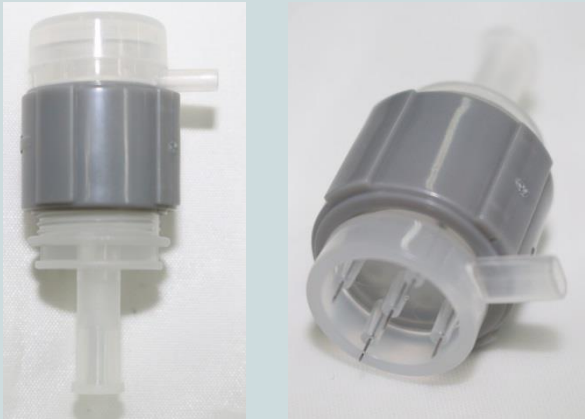				
Кол. игл	5-ИГЛ		9-ИГЛ	
Размер игл	31G		31G	
Глубина введения	0~2.5mm		0~2.5mm	
Регулируемость	○		○	
Регулировка	Вращение (1 круг = 1 mm)		Вращение (1 круг = 1 mm)	

Преимущества

7. Совместимость со многими видами шприцов

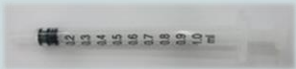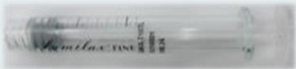Шприц	Длина	Диаметр
1мл 	90.1 ± 0.1 мм	6.8 ± 0.1 мм
2мл 	93.8 ± 0.1 мм	11.9 ± 0.1 мм
3мл 	91.9 ± 0.1 мм	9.9 ± 0.1 мм
5мл 	89.8 ± 0.1 мм	14.0 ± 0.1 мм

8. Лёгкая и простая в использовании программа

- Уровень дозы : 1~9
- Объём дозы : 0.01~0.1мл
- Возможность непрерывной работы

Преимущества

9. LCD экран высокого разрешения



9. Современный дизайн




Сравнение

Название	 LeFil	 Продукт С
Приёмный фильтр	Доступно	Доступно
Время работы	Длительное	Не более 50 раз использования
Шприц	Совместим со многими видами шприцов	Не совместим с обычными шприцами
Непрерывная работа	Доступно	Не доступно
Объёмы доз	0.01 ~ 5 мл <36 вариаций>	3 вариации
LCD панель	Доступно	Не доступно
Беспроводное использование, возможность перезарядки	Доступно	Не доступно

Процедура использования



Функции контроллера

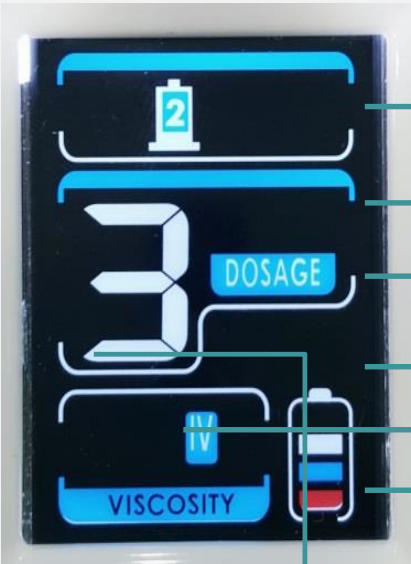

Номер / Название	Примечания
① Syringe type (тип шприца)	1,2,3 и 5мм
② Speed (скорость)	От 1 до 5
③ Dosage (уровень дозы)	От 1 до 9
④ Auto (режим работы)	Ручной / автоматический
⑤ Viscosity (уровень вязкости)	От 1 до 5
⑥ Battery state (состояние батареи)	Отображение уровня заряда
⑦ Indicator (индикатор)	Обозначение уровня скорости, дозы и т.д.

Настройка объёма дозы

Объём дозы	1мл	2мл	3мл	5мл
1	0.01666	0.01466	0.02027	0.01968
	60 инъекции	150 инъекции	148 инъекции	254 инъекции
2	0.02174	0.01571	0.02857	0.002551
	46 инъекции	140 инъекции	105 инъекции	196 инъекции
3	0.02439	0.01833	0.03529	0.03164
	41 инъекции	120 инъекции	85 инъекции	158 инъекции
4	0.02	0.022	0.04285	0.04424
	36 инъекции	100 инъекции	70 инъекции	113 инъекции
5	0.02777	0.0275	0.05	0.05
	31 инъекции	80 инъекции	60 инъекции	100 инъекции
6	0.03225	0.03666	0.06	0.05555
	27 инъекции	60 инъекции	50 инъекции	90 инъекции
7	0.03703	0.055	0.075	0.0625
	21 инъекции	40 инъекции	40 инъекции	80 инъекции
8	0.09090	0.11	0.1	0.07142
	11 инъекции	20 инъекции	30 инъекции	70 инъекции
9	Режим постоянной работы			

Дозы введения Regenovue Aquashine

Доза шприца	Regenovue Aquashine (3мл)	Regenovue Aquashine Plus (3мл)
5 **	0.05	0.05
	150 инъекции	150 инъекции
6 **	0.06	0.06
	100 инъекции	100 инъекции

****Уровень вязкости - 4**

Области применения

1. Для лица

- ГК
- Мезо
- Плазма
- Плацента
- Витамины
- Пептиды



2. При омолаживательных процедурах

- Токсинотерапия
- Уход за кожей



4. При лечении ожирения

- Инъекции LLD
- Инъекции PPC
- Инъекции HPL
- Инъекции коктейлей




3. При уходе за волосами

- Средство против выпадения волос
- Гидротоксинотерапия
- И др. препараты для волос



Эффект от использования аппарата

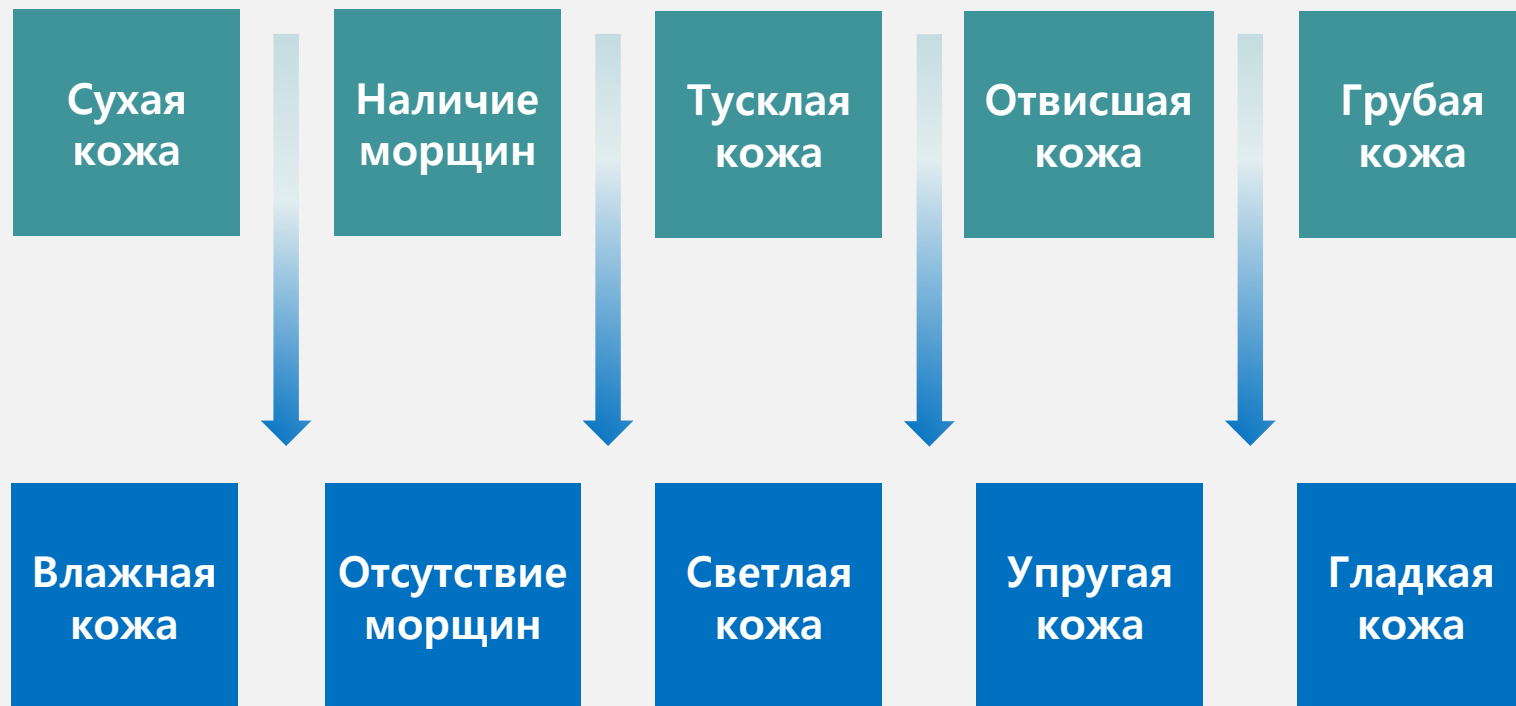

Рекомендуем использовать биоревитализанты Regenovie Aquashine (Обычный / модель Plus)



REGENOVUE Aquashine

Гель НЕ скрещенной ГК высокого качества

REGENOVUE Aquashine Plus

Гель минимально скрещенной ГК высокого качества





Эффекты процедуры Aquashine

Омоложение кожи

- ✓ яркость кожи
- ✓ текстура кожи
- ✓ эластичность кожи
- ✓ подтягивание пор
- ✓ удаление пигментов(веснушки, пятна)
- ✓ дополнение к макияжу

Против старения


- ✓ удаление тонких морщин
- ✓ улучшает эластичность кожи
- ✓ предотвращает старение кожи

Увлажнение

- ✓ улучшает состояние сухой кожи
- ✓ улучшает состояние кожи в независимости от смены времен года
- ✓ удаляет мертвые клетки кожи

Эффект

- ✓ видимый результат уже после **1-2 недель**
- ✓ продолжительность **3-4 месяца**

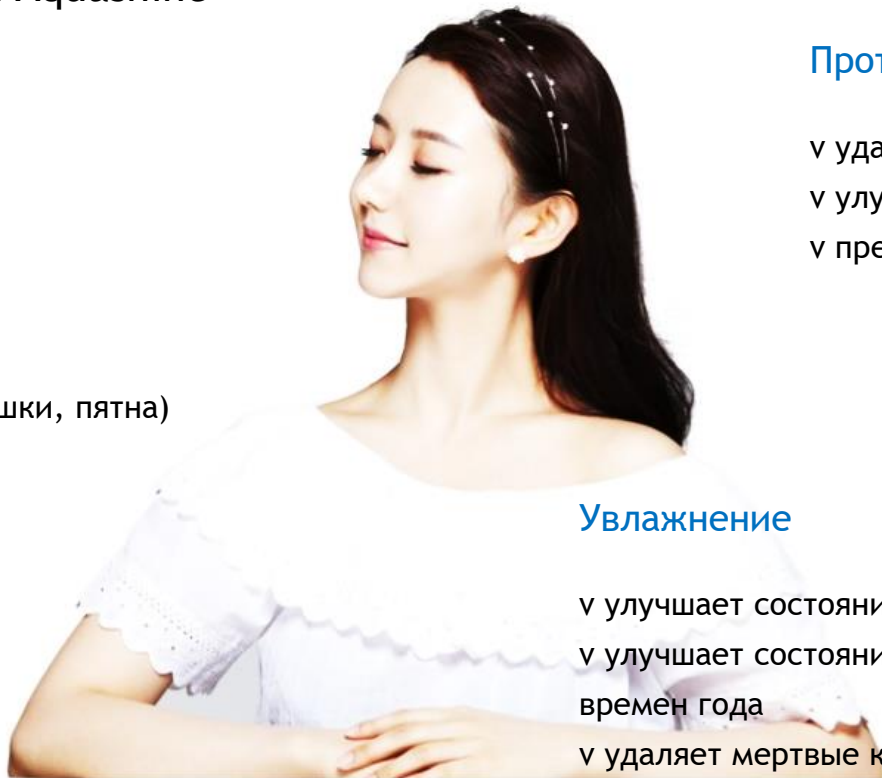



REGENOVUE Aquashine

Гель с высоким качеством ГК

Области применения

Лоб



Вокруг глаз



Бровь



Носогубные складки



Губы



Подбородок



Либо используя инъекционное устройство, придать эффект для максимальной области лица



REGENOVUE Aquashine

Гель с высоким качеством ГК

Отличия ГК в филлерах REGENOVUE и в REGENOVUE Aquashine

ГК филлера REGENOVUE

Скрещен с помощью BDDE, эффективен для восстановления объема и заполнения морщин



Отличие

ГК REGENOVUE Aquashine

Не скрещенный, эффективен для увлажнения кожи, предотвращения сухости и придает яркость коже.



REGENOVUE Aquashine (серебристый)

REGENOVUE Aquashine,

Не скрещенный, чистая ГК, Максимальное улучшение состояния кожи в течении короткого периода



REGENOVUE Aquashine Plus (золотистый)

REGENOVUE Aquashine Plus,

Минимальное скрещение ГК из чистой ГК, длится дольше, поскольку дольше остается в коже





REGENOVUE Aquashine Series

High Quality HA Gel

До и после



Комплексная процедура по уходу за кожей

Спасибо



Address: #302, 146, Seonyu-ro, E&C Dream Tower, Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea (07255)

Tel: +82-2-583-1348 **Fax:** +82-2-2038-0848

Email: info@neogenesis.co.kr

Homepage: www.neogenesis.co.kr