

# СПОТЛЕС

Многофункциональный дивайс

Для удаления пятен и подтяжки кожи

**Радиочастотное  
плазменное устройство**




# Многофункциональный портативный аппарат для удаления пятен и подтяжки кожи

Фракционная шлифовка кожи проходит без боли



Спотлес устраняет проблемы с кожей, испаряя клетки кожи с минимальным повреждением.

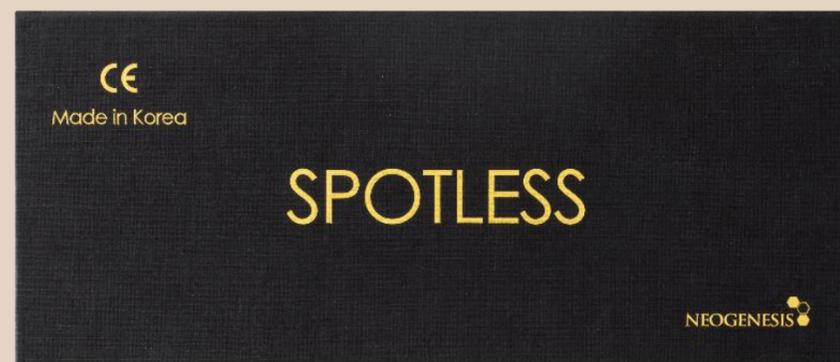

4 типа насадок, от удаления пятен до разглаживания морщин, позволяют проводить различные процедуры с помощью всего одного устройства.


Упаковка

Устройство



# Безопасное лечение путем выпаривания кожи плазменной энергией

Настоящая плазма способствует **быстрой регенерации клеток** с минимальным повреждением

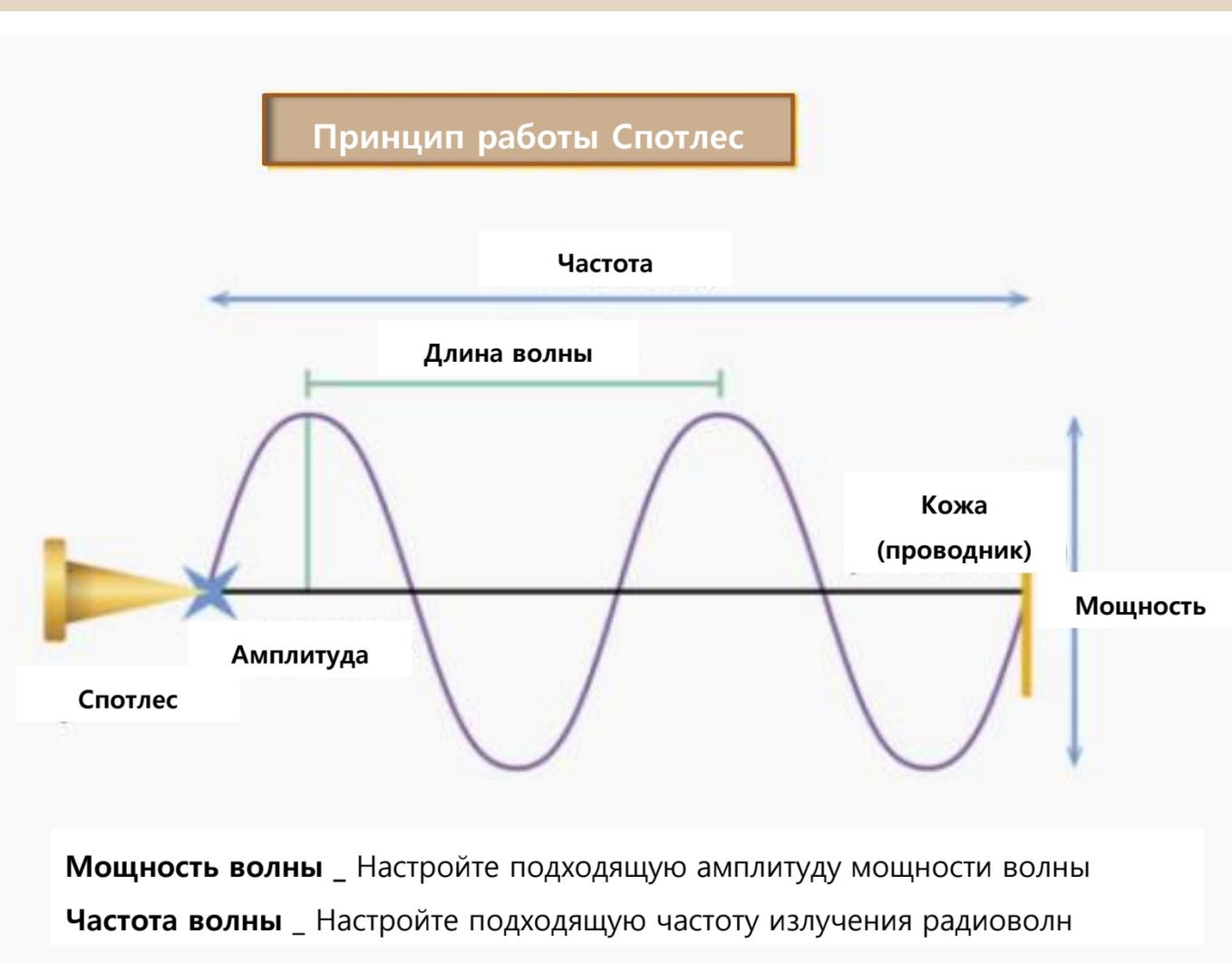


- Высокая мощность 24 В и стабильная длина волны
- Удобные функции для легкого использования
- Поддержка без предварительного нагрева и зарядки
- Функция предотвращения перегрева

Наконечники Спотлес излучают высокочастотную энергию плазменной дуги, когда приближаются к проводнику, например как человеческое тело.

Энергия плазмы испаряет клетки эпидермиса без контакта и обеспечивает быстрое восстановление без шрамов.

# 64 комбинации энергии плазмы доступны для фракционного лечения

8 регулируемых уровней мощности и частоты для точной работы

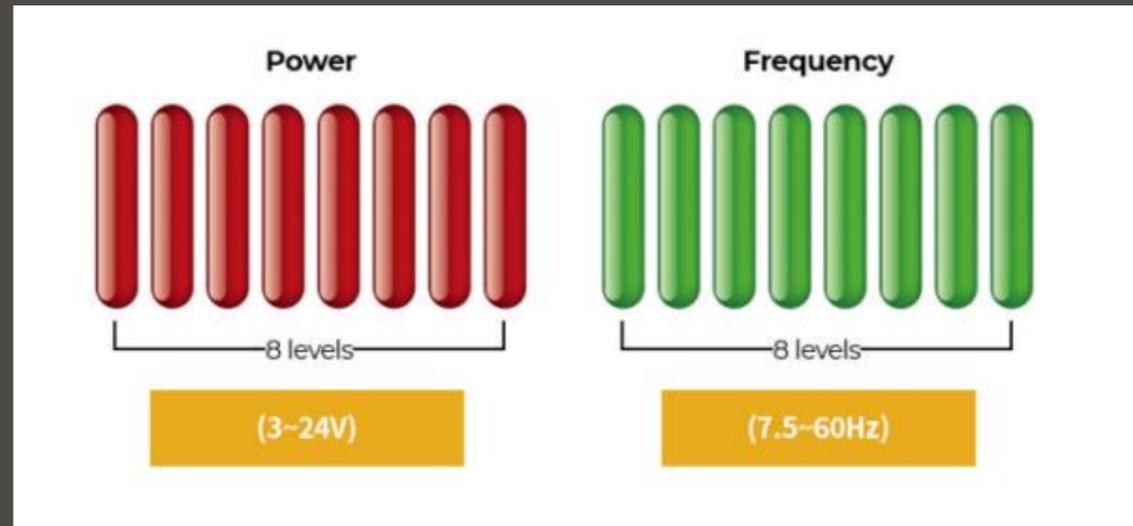

Можно регулировать в диапазоне от 1 до 8 в зависимости от области применения



# Теперь в моде минимализм!

Лазерные процедуры теперь проще  
с помощью устройства Спотлес!

**Отличный захват и компактный размер**

Вес: 53гр

Параметры: 170 x 35 x 15мм

**Экономическая эффективность по сравнению с  
большим лазерным устройством**

Низкое энергопотребление

Рациональная цена расходных материалов

1 год гарантии + пожизненное обслуживание



# 4 типа совместимых наконечников для различного применения

Диверсификация плазменной энергии

**Обычная насадка**

**Плотная плазменная энергия**




**Острая насадка**

**Тонкая тепловая энергия**

**Плоская насадка**

**Широкая тепловая энергия**

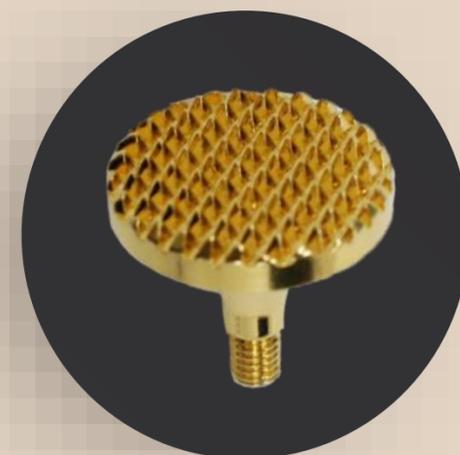




**Фракционная насадка**

**Фракционная плазменная энергия**

Помимо удаления пятен, Спотлес способствует выработке коллагена и регенерирует кожу с помощью различных насадок.

# Обычная насадка : Мгновенно удаляет различные мелкие пятна на коже

## Значительное устранение рубцов

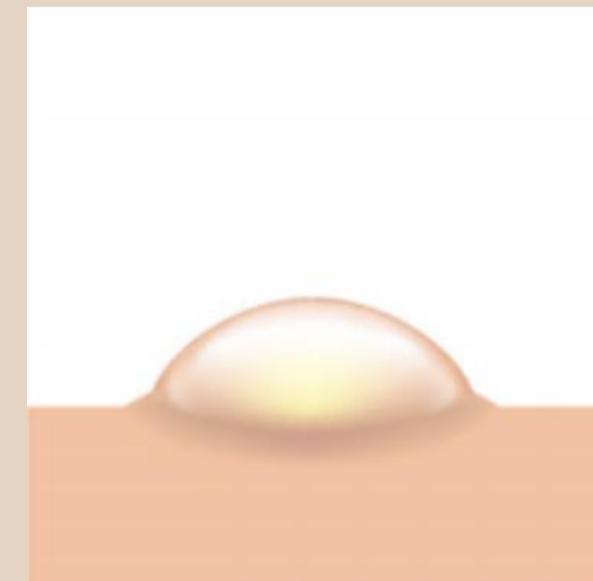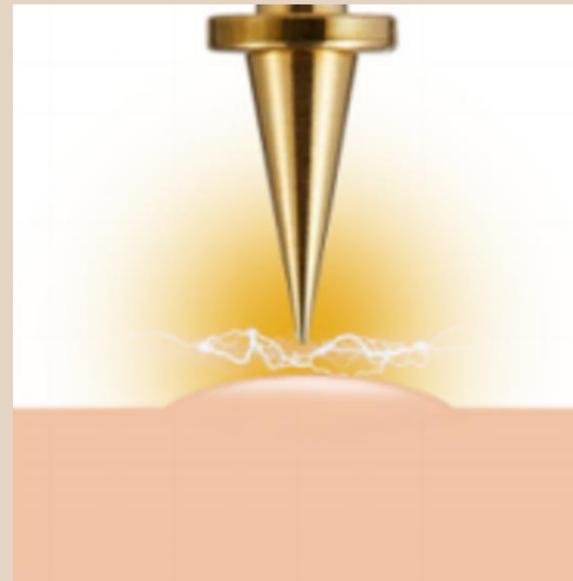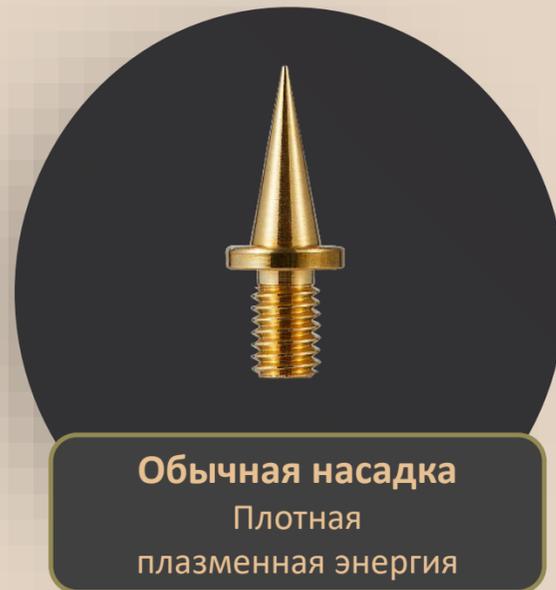

\* В случае объёмных процедур могут потребоваться 2-3 дополнительные обработки.

Потовые железы

Бородавki

Шрамы

Милиум

Мелкие родинки

Папилломы



Веснушки

### Краткое руководство по использованию :

После подготовки поднесите аппарат на расстоянии 1~3 мм от \*поверхности кожи (пример выше) и непрерывно нажимайте кнопку в верхней части Спотлес, пока не будет нанесена вся желаемая область.

# Плоская насадка : Восстановление эластичности кожи

Тепловая энергия, доставляемая в глубокие слои дермы, способствует выработке коллагена

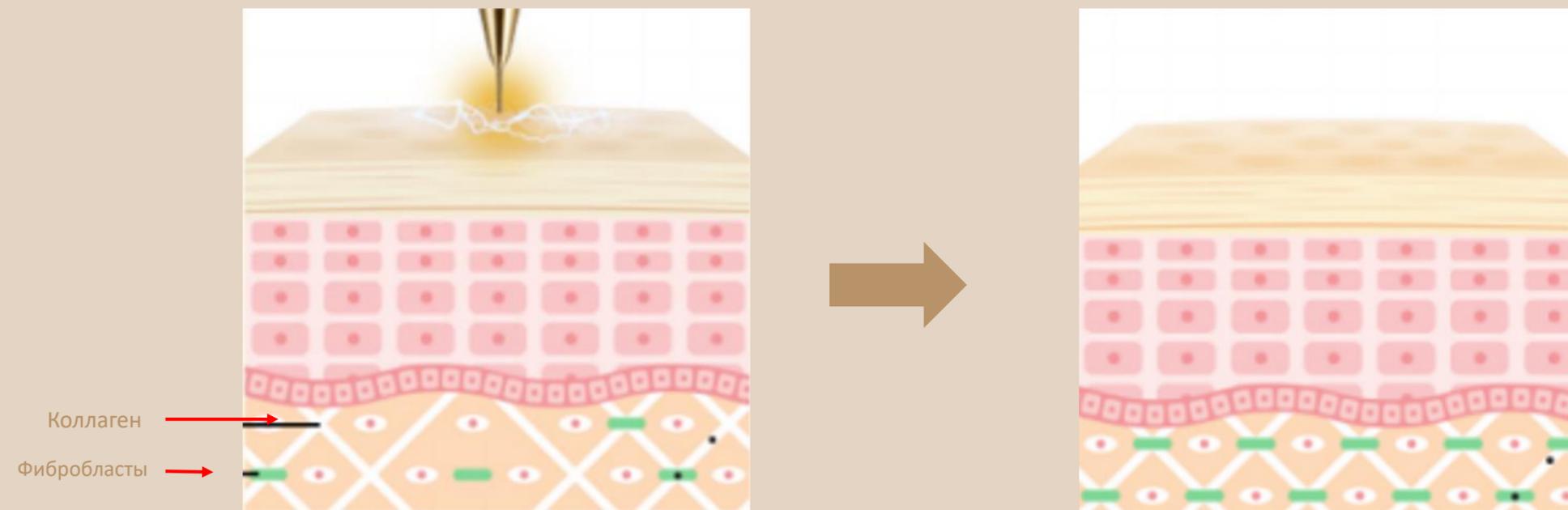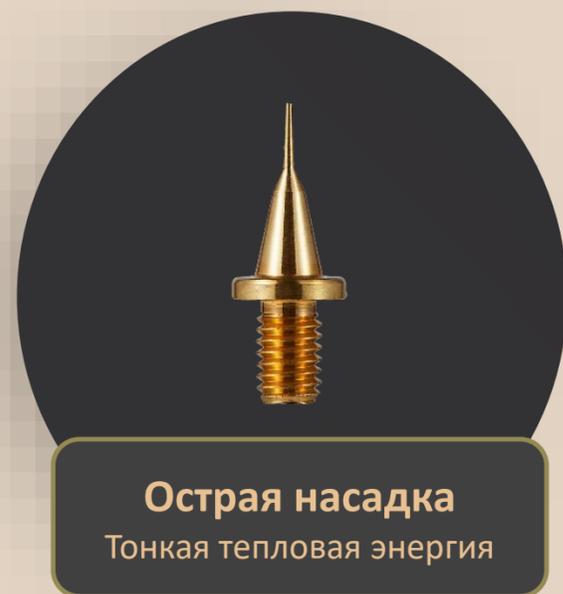

\* В случае объёмных процедур могут потребоваться 2-3 дополнительные обработки.

Сужение пор

Лифтинг кожи

Регенерация кожи

Удаление пятен

Удаление морщин


## Краткое руководство по использованию :

После подготовки поднесите аппарат на расстоянии 1~3 мм от \*поверхности кожи (пример выше) и непрерывно нажимайте кнопку в верхней части Спотлес, пока не будет обработана вся желаемая область.

\* Создано специально для использования в более глубоких и/или более узких областях для концентрации плазмы

# Плоская насадка : Восстановление эластичности кожи

Тепловая энергия, доставляемая в глубокие слои дермы, способствует выработке коллагена

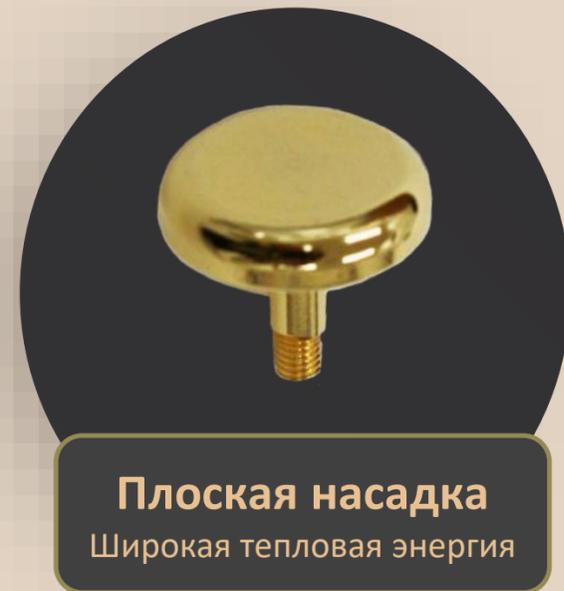

Лифтинг кожи

Удаление мелких морщин

Отбеливание кожи

Повышение эластичности

Сужение пор

Естественная активация



## Краткое руководство по использованию :

После подготовки поднесите наконечник на поверхность кожи и непрерывно нажимайте кнопку на верхней части Спотлес, затем аккуратно потрите и помассируйте область процедуры. Требуется послепроцедурный уход.\*

\*Рекомендуем наносить бета-сыворотку после процедуры

# Фракционная насадка : Активация выработки эластина

Восстановление кожного каркаса за счет усиления выработки собственного коллагена

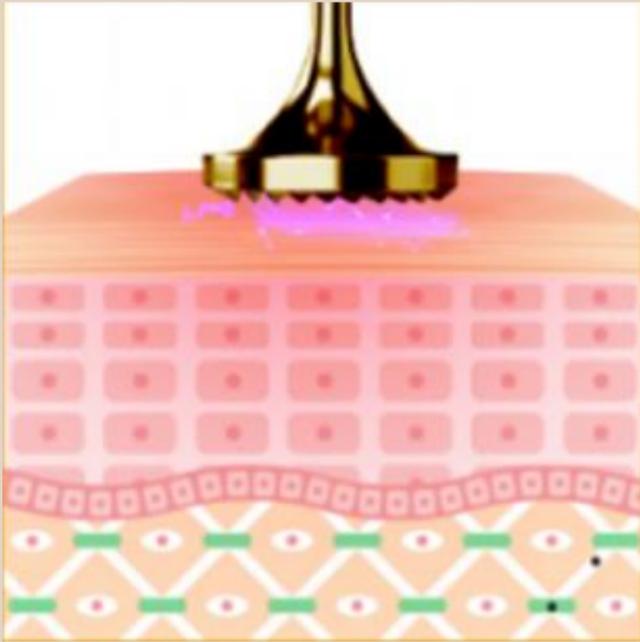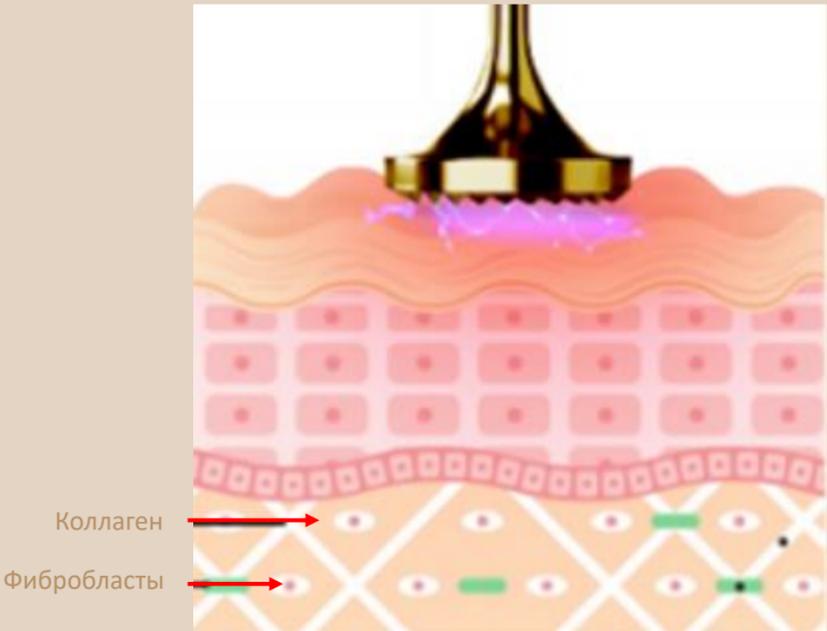

Удаление мелких морщин

Лечение акне

Очищение пор

Естественная активация

Эксфолиация

Выравнивание поверхности кожи

### Краткое руководство по использованию :

Нанесите средство для предварительного ухода (например, бета-сыворотку) и поместите наконечник на поверхность кожи.


Нажмите и удерживайте кнопку Спотлес в течение 1–2 секунд, пока не появится след. Продолжайте процедуру по мере необходимости.

Требуется послепроцедурный уход.\*

\* \*Рекомендуем наносить бета-сыворотку также после процедуры

# Потрясающие результаты после одной процедуры

Быстрое восстановление после процедур: заживление и преображение кожи

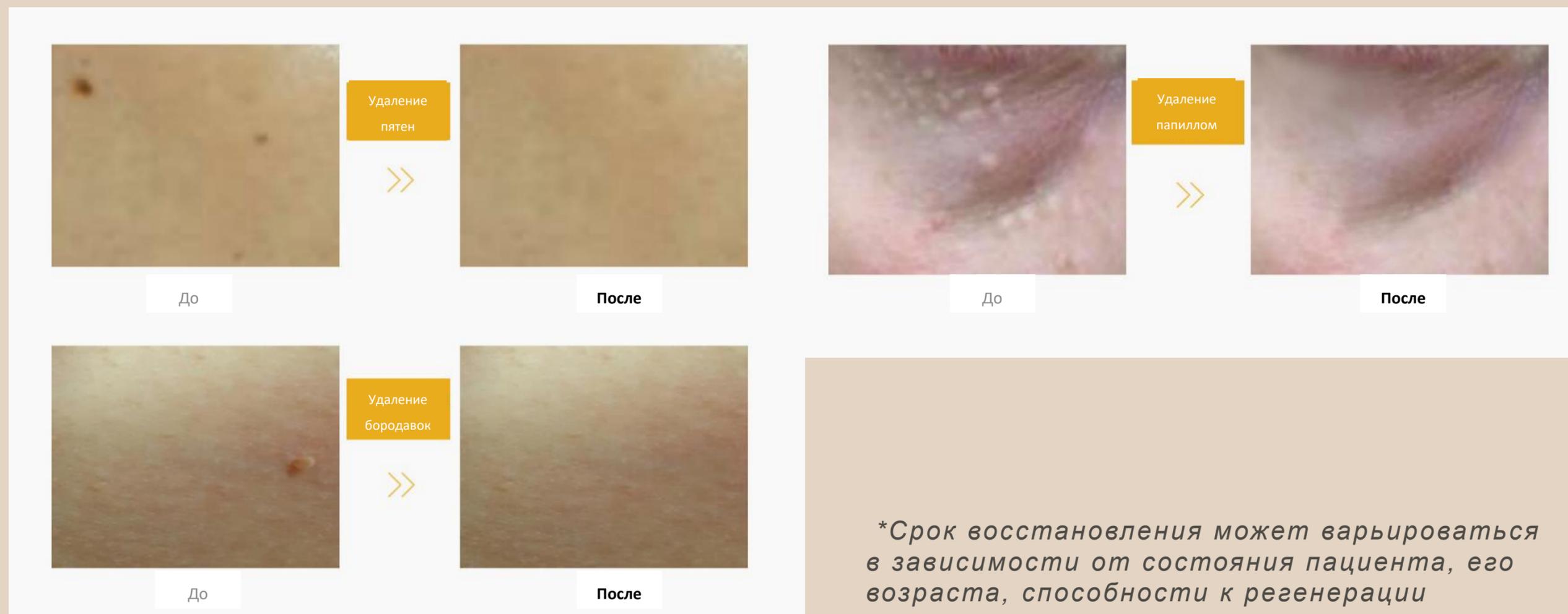


*\*Срок восстановления может варьироваться в зависимости от состояния пациента, его возраста, способности к регенерации*

Спотлес идеально помогает предотвратить возможные проблемы с кожей

# Морщины уменьшились, а эластичность значительно улучшилась

Также эффективен для использования на шее и руках

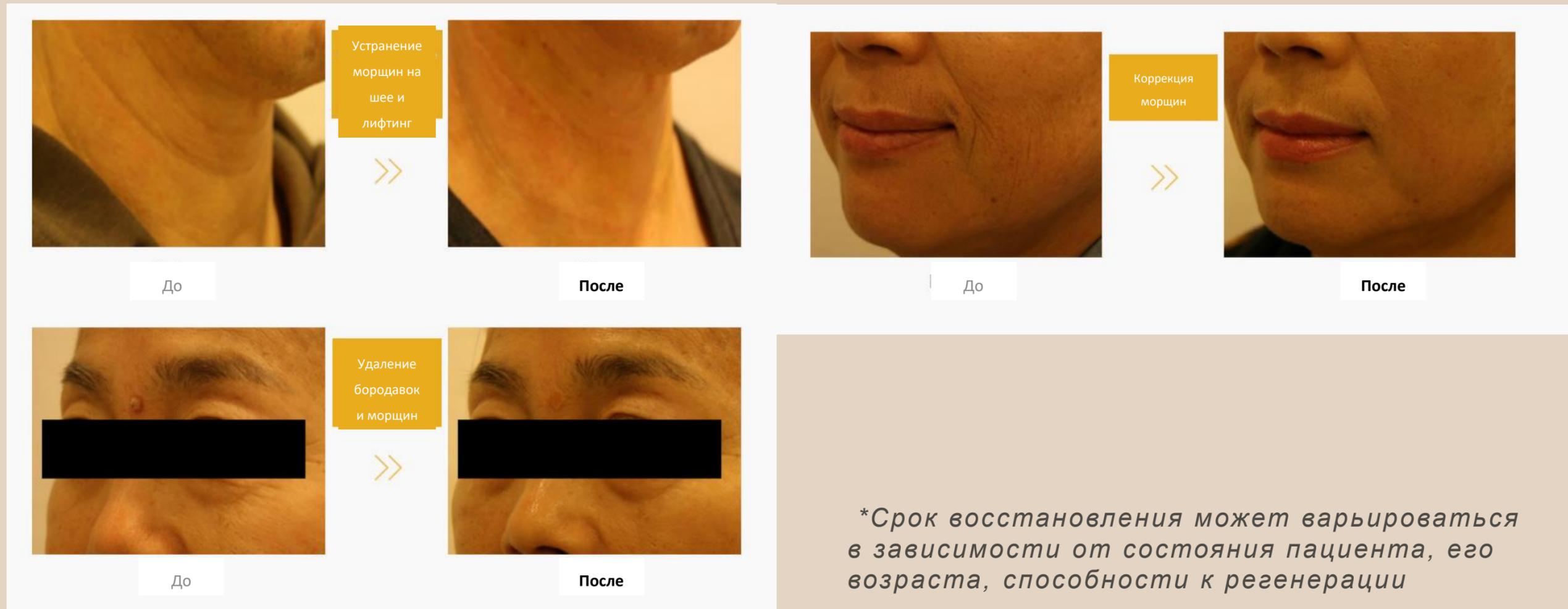

*\*Срок восстановления может варьироваться в зависимости от состояния пациента, его возраста, способности к регенерации*

Спотлес помогает избавиться от глубоких морщин на лице



# Технические характеристики

Применение	Родинки, веснушки, кожные пятна и т. д.
Источник питания	110-240В / 60Гц, 0.5А
Блок питания	DC 24V, 1A
Параметры	170 x 35 x 15мм
Вес (Аппарат + аксессуары)	53гр
Компоненты	Аппарат, зарядка, насадки (2 обычные + 1 острая)

- Расходные материалы: Обычная / Острая / Плоская / Дробная насадка
- Функция управления мощностью и частотой (8 уровней)



# Регистрация

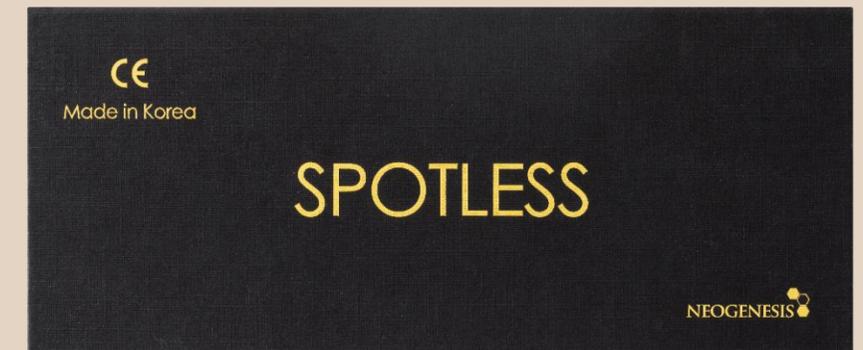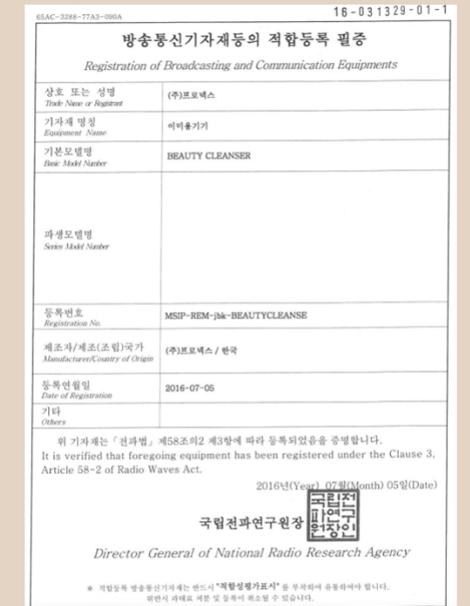

# Профессиональный уход

с продукцией от компании Неогенезис

Уход за кожей с Бета серией  
до и после  
косметологических процедур

Превосходный увлажняющий  
и успокаивающий эффект,  
оптимизированный для  
эстетических процедур.



Использование  
крема-анестетика Нео

Два разных вида анестетиков  
на Ваше предпочтение



# Свяжитесь с нами

Для вопросов и комментариев



**Адрес:** #302~304 E&C Dream Tower, 146, Seonyu-ro  
Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea (07255)

**Телефон:** +82-2-583-1348 **Факс:** +82-2-2038-0848

**Электронная почта:** [info@neogenesis.co.kr](mailto:info@neogenesis.co.kr)

**Официальный сайт:** [www.neogenesis.co.kr](http://www.neogenesis.co.kr)

